

SCHULUNGS- HANDBUCH

Accu-Chek® Solo Mikropumpensystem




BASALRATENPROFILE ANPASSEN UND HINZUFÜGEN

Gründe für mehrere Basalratenprofile


Es ist sinnvoll, zusätzlich zum normalen Basalratenprofil weitere Basalratenprofile für verschiedene Alltagssituationen zu haben. Sie können bis zu 5 Basalratenprofile im Diabetes Manager programmieren. Besprechen Sie die Verwendung verschiedener Basalratenprofile mit Ihrem Arzt oder Diabetesberater.

Beispiel

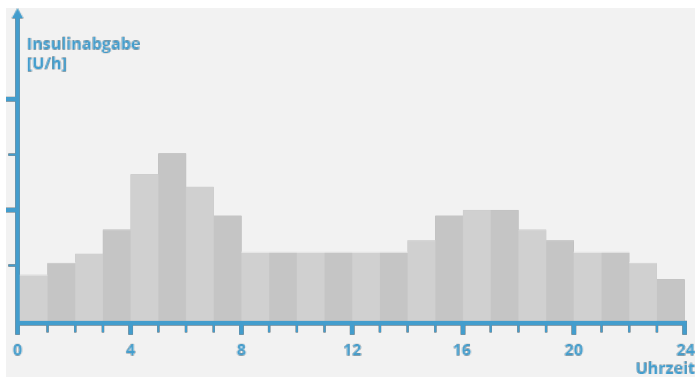

Basalratenprofil 1.

Montag bis Freitag = Arbeitstage

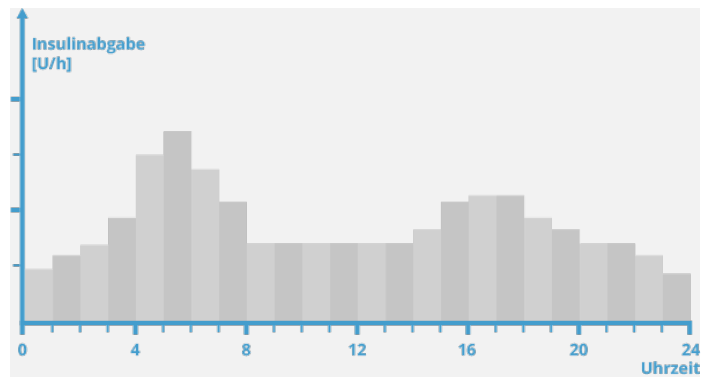

Basalratenprofil 2.

Wochenende = Freizeit und Entspannung


In unserem Beispiel ist der Benutzer ein Bauarbeiter, der von Montag bis Freitag von frühmorgens bis zum Arbeitsende auf den Beinen ist. Am Wochenende schläft er hingegen gerne lange und entspannt sich stundenlang beim Lesen. Nachdem er diese unterschiedlichen Tagesabläufe mit seinem Arzt besprochen hatte, programmierte er Basalratenprofil 1 für Arbeitstage. Dann programmierte er Basalratenprofil 2, das samstags und sonntags mehr Basalinsulin bereitstellt.

Programmieren eines Basalratenprofils


01

07:00

106 mg/dL
06:55, 29 Mär 2018




 150 U




Profil 1
1,20 U/h
Neuer Bolus +




Hauptmenü  Daten hinzufügen



Tippen Sie in der Statusanzeige auf das Basalratenprofil.


07:00

 Bolus  Basalrate  Stopp



 Messen  Austauschen  Einstellungen

 Meine Daten  Verbinden  Flugmodus

 Signaltöne  Hilfe

Status-anzeige  Daten hinzufügen

Tippen Sie im Hauptmenü auf [Basalrate](#).

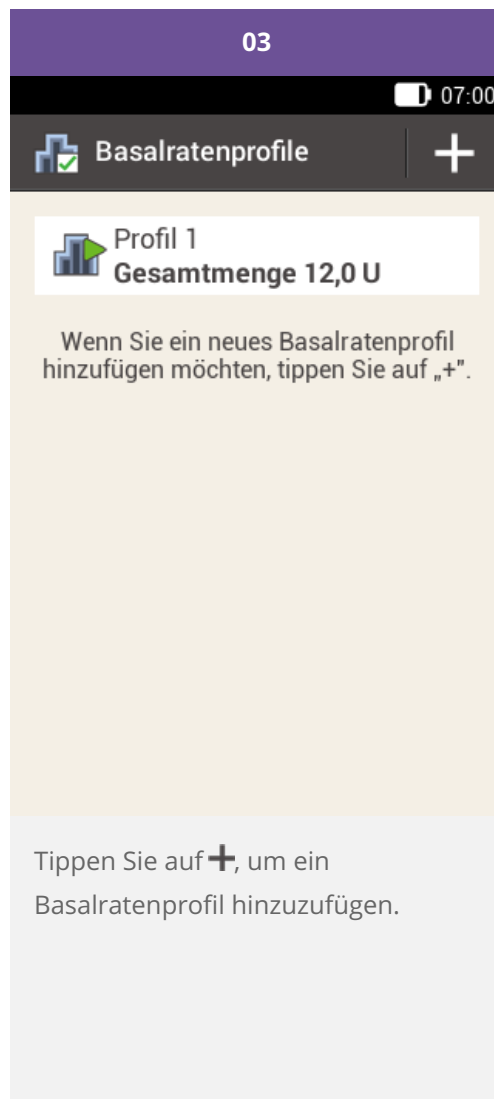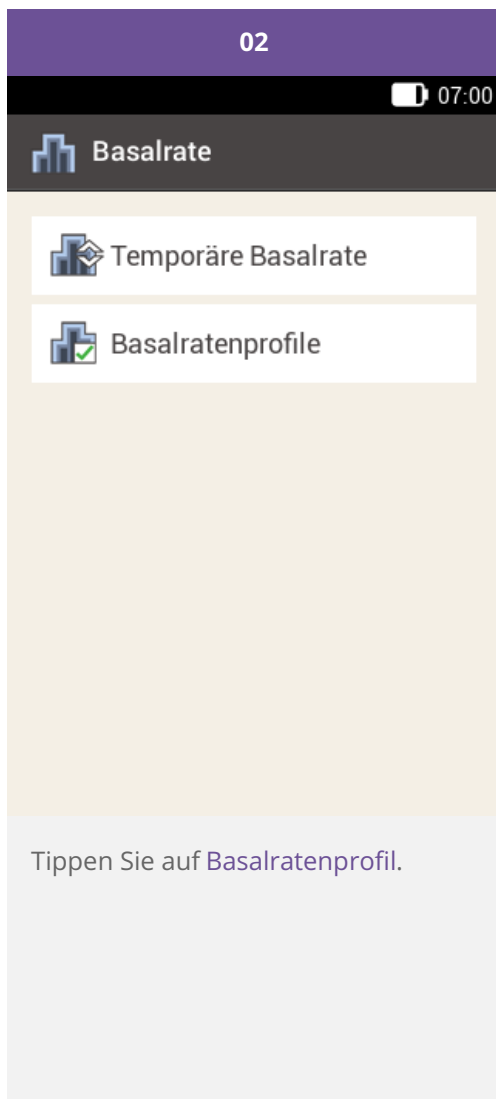

04

07:00


Basalratenprofil

Profil 1

Anfang	Ende	U/h
07:00	08:00	0,00
08:00	09:00	0,00
09:00	10:00	0,00

Speichern

Aktivieren

Tippen Sie auf , um dem Basalratenprofil einen Namen zu geben.

05

07:00

Basalratenprofil

Profil 1

Anfang	Ende	U/h
07:00	08:00	0,00

q

w

e

r

t

y

u

i

o

p

a

s

d

f

g

h

j

k

l

⬆

z

x

c

v

b

n

m

⬅

?123

,

.

Done

Geben Sie den gewünschten Namen für das Basalratenprofil ein. Er darf höchstens 12 Zeichen haben.

Tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

06

07:00

Basalratenprofil

☰
▮

Profil 2

Anfang	Ende	U/h
07:00	08:00	0,00
08:00	09:00	0,00
09:00	10:00	0,00

Speichern
Aktivieren

Wählen Sie den ersten Zeitabschnitt aus.

07

07:00

Endezeit

−
08 :
 30
+

Speichern

Geben Sie die Endezeit des Zeitabschnitts ein.

Tippen Sie auf Speichern.

i Hinweis

Bei Zeitabschnitten für Basalratenprofile können Sie nur die Endezeit bearbeiten. Die Anfangszeit jedes Zeitabschnitts ist mit der Endezeit des vorherigen Zeitabschnitts identisch.

Um einen Zeitabschnitt zu löschen, stellen Sie die Endezeit des Zeitabschnitts so ein, dass sie mit der Anfangszeit desselben Zeitabschnitts identisch ist.

Um einen neuen Zeitabschnitt hinzuzufügen, stellen Sie die Endezeit des letzten Zeitabschnitts so ein, dass sie gleich der gewünschten Anfangszeit des neuen Zeitabschnitts ist.

Zeitabschnitte für Basalratenprofile sind nicht mit Zeitabschnitten für Bolusvorschläge identisch und werden auch nicht für diese verwendet.

08

07:00

Basalrate

– 1,50 +

U/h

Speichern

Geben Sie die Insulinmenge pro Stunde für den Zeitabschnitt ein.

Tippen Sie auf [Speichern](#).

Geben Sie dann die Endezeiten und die stündlichen Basalraten ein, bis Sie Basalraten für den gesamten Tag programmiert haben.

Wenn Sie dieses Basalratenprofil speichern, aber noch nicht aktivieren wollen, fahren Sie mit Schritt 09 fort.

Wenn Sie das neue Basalratenprofil speichern und sofort aktivieren wollen, tippen Sie auf „Aktivieren“. Fahren Sie dann mit Schritt 11 fort.

09

07:00


Basalratenprofil

Profil 2

Anfang	Ende	U/h
07:00	08:30	1,50
08:30	09:00	0,00
09:00	10:00	0,00

Speichern Aktivieren

Tippen Sie auf [Speichern](#), um das programmierte Basalratenprofil zu speichern.

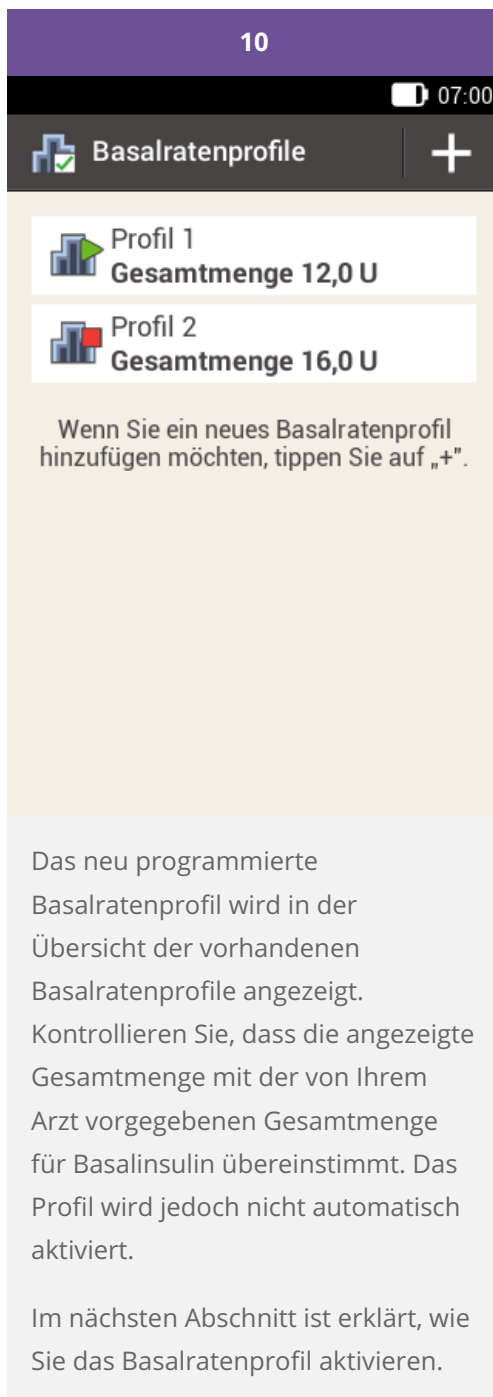

Aktivieren eines Basalratenprofils


Aktivieren Sie das Profil, das für einen bestimmten Zeitraum gilt. Freitag Abend, wenn das Wochenende bevorsteht, können Sie beispielsweise das Profil aufrufen, das Sie für Wochenenden programmiert haben.

01

07:00

106 mg/dL

06:55, 29 Mär 2018

 150 U


Profil 1

1,20 U/h

Neuer Bolus


+


Hauptmenü





Daten hinzufügen


07:00


 Bolus


 Basalrate


 Stopp


 Messen


 Austauschen


 Einstellungen

 Meine Daten


 Verbinden

 Flugmodus

 Signaltöne

 Hilfe


Status-anzeige



Daten hinzufügen

Tippen Sie in der Statusanzeige auf das Basalratenprofil.

Tippen Sie im Hauptmenü auf [Basalrate](#).

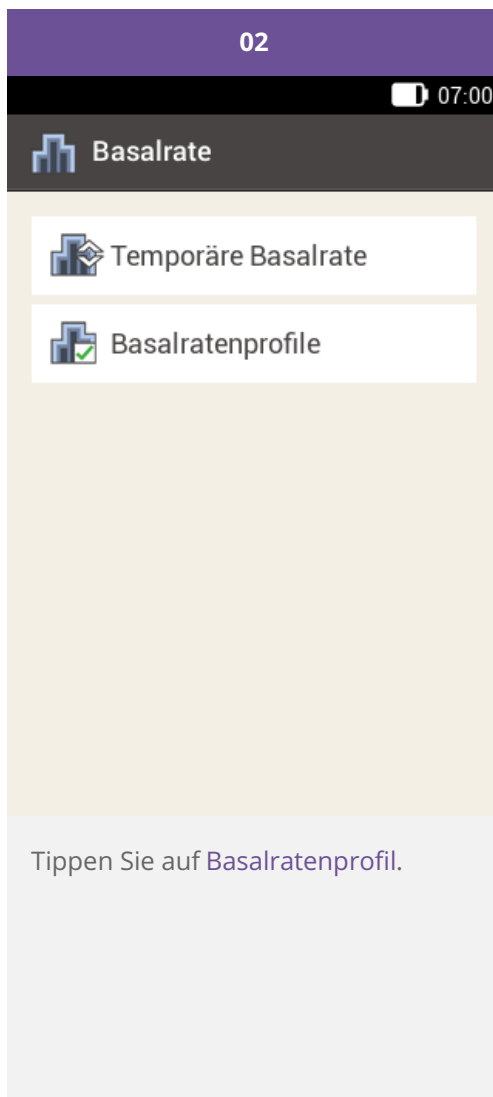


04

07:00

Basalratenprofil

☰

▮▮▮



Profil 2

Anfang	Ende	U/h
07:00	08:30	1,50
08:30	09:00	1,30
09:00	10:00	0,90

Speichern

Aktivieren

Schieben Sie die Anzeige ggf. nach oben, um alle Zeitabschnitte des Basalratenprofils zu sehen.

Tippen Sie auf , um die Grafik des Profils aufzurufen.

Tippen Sie auf [Aktivieren](#).

05


07:00

Insulin abgeben


**Basalraten-
profil aktivieren**

Profil 2
Gesamtmenge **16,0 U**

Zur Bestätigung drücken Sie


Zur Bestätigung drücken Sie auf die Insulintaste .

06

 07:00

106_{mg/dL}

06:55, 08 Mär 2017

 150 U

Profil 1

1,50 U/h

Neuer Bolus 

Hauptmenü



Daten hinzufügen

Das aktivierte Basalratenprofil wird in der Statusanzeige angezeigt.

Basalratenprofil ändern

01

07:00

Basalratenprofile


+

Profil 1
Gesamtmenge 12,0 U

Profil 2
Gesamtmenge 16,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.



Tippen Sie auf das Basalratenprofil, das Sie ändern möchten (z. B. auf Profil 2).

Das jeweils aktive Basalratenprofil erkennen Sie am Symbol .

02

07:00

Basalratenprofil



Profil 2

Anfang	Ende	U/h
07:00	08:30	1,50
08:30	09:00	1,30
09:00	10:00	0,90

Speichern

Aktivieren

Tippen Sie auf eine Endezeit, um die Endezeit des Zeitabschnitts zu ändern.

Tippen Sie auf eine Basalrate, um die Basalrate des Zeitabschnitts zu ändern.

Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, bis die korrekte Basalrate für den gesamten Tag programmiert ist.

Tippen Sie auf [Speichern](#).

Hinweis

Schieben Sie die Anzeige ggf. nach oben, um alle Zeitabschnitte des Basalratenprofils überprüfen zu können.



Basalratenprofile



Profil 1

Gesamtmenge 12,0 U

Profil 2

Gesamtmenge 16,0 U

Wenn Sie ein neues Basalratenprofil hinzufügen möchten, tippen Sie auf „+“.

Das geänderte Basalratenprofil wird in der Übersicht der vorhandenen Basalratenprofile angezeigt.


Prüfen Sie, ob die angezeigte Gesamtmenge mit der von Ihrem Arzt vorgegebenen Gesamtmenge übereinstimmt.

Löschen eines Basalratenprofils


01

07:00

106 mg/dL
06:55, 29 Mär 2018




 150 U




Profil 1
1,20 U/h
Neuer Bolus +




Hauptmenü  Daten hinzufügen



Tippen Sie in der Statusanzeige auf das Basalratenprofil.


07:00

 Bolus  Basalrate  Stopp


 Messen  Austauschen  Einstellungen


 Meine Daten  Verbinden  Flugmodus


 Signaltöne  Hilfe


Status-anzeige  Daten hinzufügen

Tippen Sie im Hauptmenü auf [Basalrate](#).

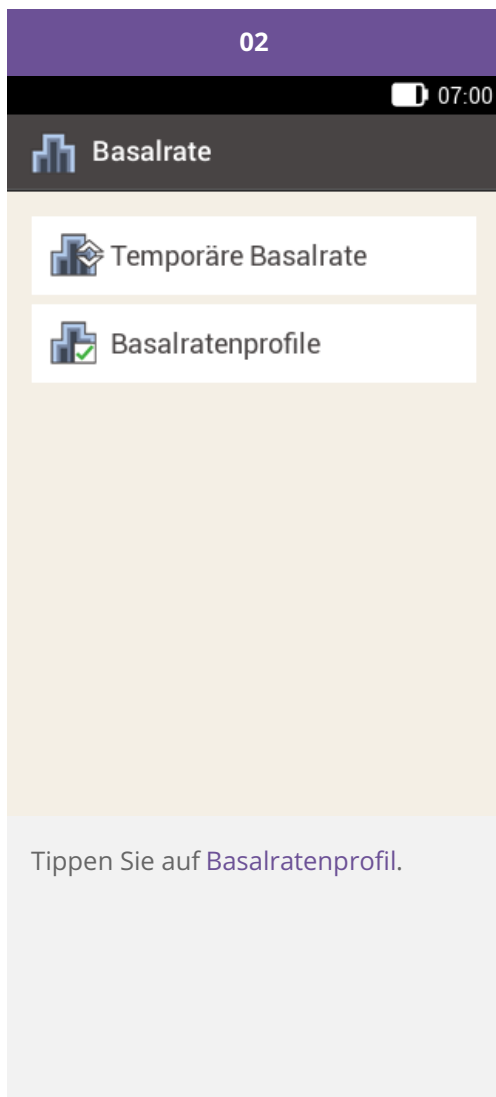

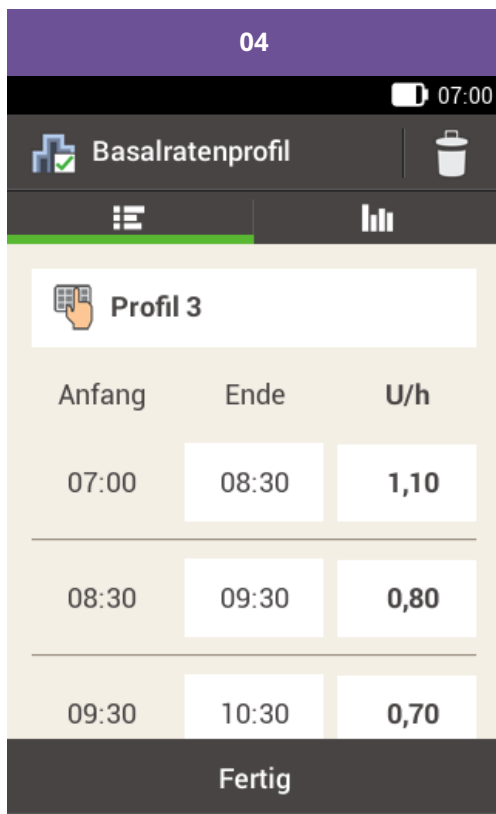

Tippen Sie auf  in der rechten oberen Ecke der Anzeige.

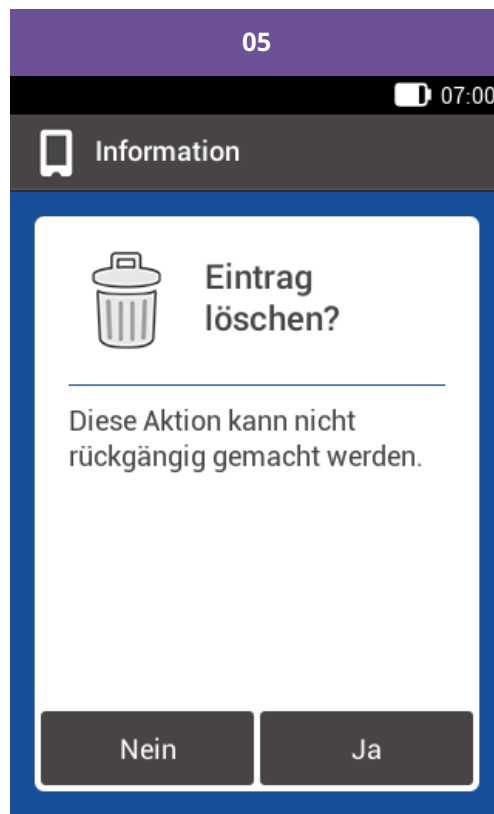

Wenn das aktive Basalratenprofil gelöscht werden soll, erscheint diese Anzeige.

Tippen Sie auf **Ja**.



Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt.

Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SOLO, ACCU-CHEK ACADEMY, ACCU-CHEK PERFORMA und ACCU-CHEK SOFTCLIX sind Marken von Roche.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch Roche erfolgt unter Lizenz.

Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern.

® 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.at

Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96

Insulinpumpen-Hotline: 01/277 27 – 596

