

SCHULUNGS- HANDBUCH


Accu-Chek® Solo Mikropumpensystem



EINSTELLUNGEN FÜR DEN BOLUSVORSCHLAG ÄNDERN

Einstellungen des Bolusvorschlags ändern

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Werte für den Mahlzeitenanstieg, die Snackgröße, die Wirkzeit und die Wirkverzögerung geändert werden können.

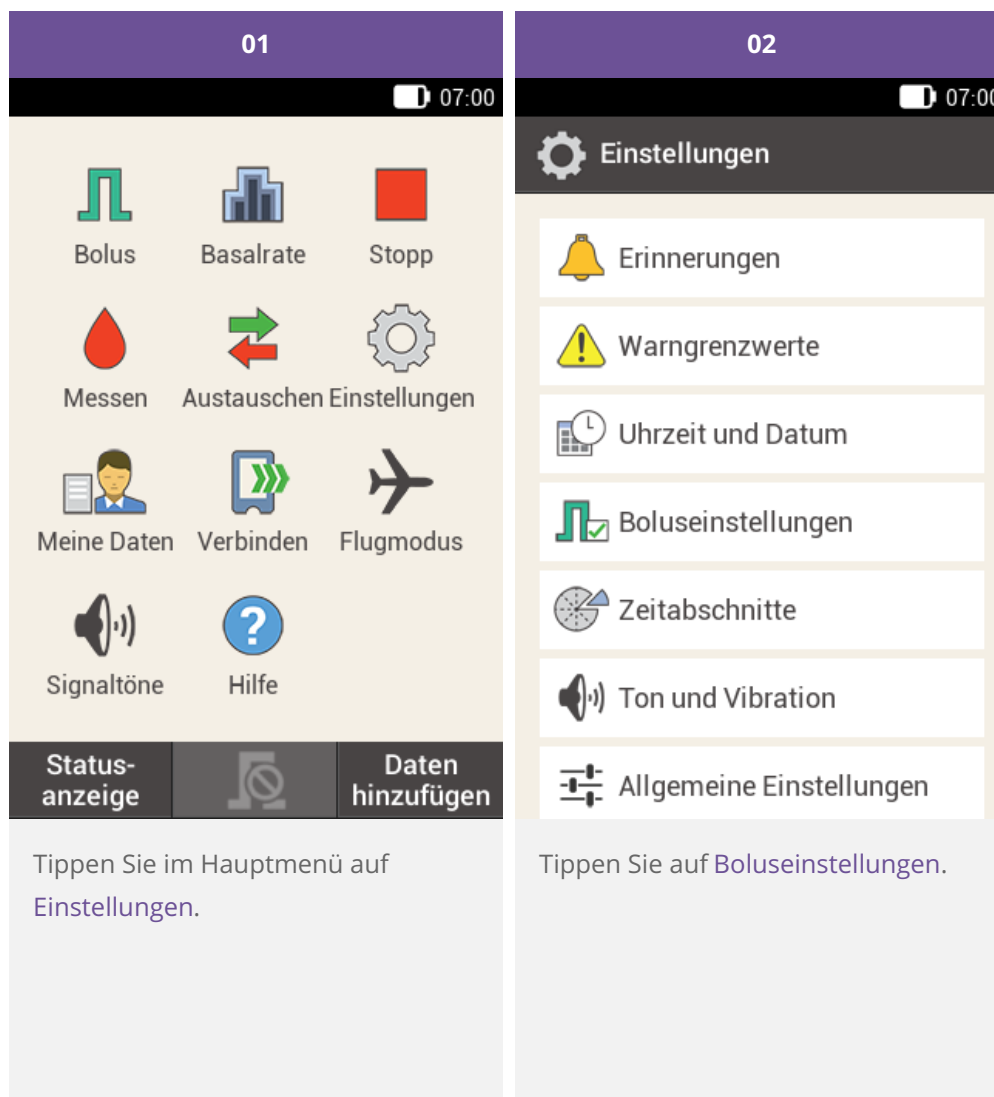

03

07:00

Boluseinstellungen

Bolusvorschlag ☒ ON

Gesundheitsereignisse

Einstellungen Bolusvorschlag

Quick-Bolus-Tasten ☒ ON

Maximaler Quick-Bolus 25,0 U

Quick-Bolus-Schritt 0,20 U

Fertig

Tippen Sie auf [Einstellungen Bolusvorschlag](#).

04

07:00

Einstellungen Bolusvorschlag

Mahlzeitenanstieg 65 mg/dL

Snackgröße 15 g

Wirkzeit 3 h 15 min

Wirkverzögerung 1 h


Fertig


Tippen Sie auf den jeweiligen Eintrag, um den Mahlzeitenanstieg, die Snackgröße, die Wirkzeit und die Wirkverzögerung einzustellen.


Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, tippen Sie auf [Fertig](#).


Prozentsätze für Gesundheitseignisse ändern


01


 07:00


 Bolus


 Basalrate


 Stopp


 Messen


 Austauschen


 Einstellungen

 Meine Daten


 Verbinden

 Flugmodus

 Signaltöne

 Hilfe


Status-
anzeige





Daten
hinzufügen


Tippen Sie im Hauptmenü auf [Einstellungen](#).


02


 07:00


 Einstellungen


 Erinnerungen


 Warnungswerte

 Uhrzeit und Datum

 Boluseinstellungen

 Zeitabschnitte

 Ton und Vibration

 Allgemeine Einstellungen

Tippen Sie auf [Boluseinstellungen](#).

03

07:00

Boluseinstellungen

Bolusvorschlag ☒ ON

Gesundheitsereignisse

Einstellungen Bolusvorschlag

Quick-Bolus-Tasten ☒ ON

Maximaler Quick-Bolus 25,0 U

Quick-Bolus-Schritt 0,20 U


Fertig


Tippen Sie auf
[Gesundheitsereignisse](#).


04


07:00


Gesundheitsereignisse


 Sport 1 0 %

 Sport 2 0 %

 Stress 25 %

 Krankheit 0 %

 Vor Periode 0 %

 Name 1 -20 %

Fertig

Tippen Sie auf das Gesundheitsereignis, dessen Einstellungen Sie ändern möchten (z. B. [Stress](#)).

05

07:00

Prozentsatz

-

15

+

%

Speichern

Geben Sie einen Prozentsatz für das ausgewählte Gesundheitsereignis ein.







Tippen Sie auf [Speichern](#).

Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um den Prozentsatz für weitere Gesundheitsereignisse einzustellen.

06

07:00

Gesundheitsereignisse

| | | |
|---|-------------|-------|
|  | Sport 1 | 0 % |
|  | Sport 2 | 0 % |
|  | Stress | 15 % |
|  | Krankheit | 0 % |
|  | Vor Periode | 0 % |
|  | Name 1 | -20 % |

Fertig

Die Gesundheitsereignisse mit den jeweils eingestellten Prozentsätzen werden angezeigt.

Tippen Sie auf [Fertig](#).

ÜBERBLICK ÜBER EINSTELLUNGEN

Im Menü „Einstellungen“ können die folgenden Elemente zur Anpassung des Mikropumpensystems verändert werden:

| Einstellung | Erläuterung |
|---------------------------------|--|
| Erinnerungen | Erinnerungen helfen Ihnen dabei, die verschiedenen Maßnahmen Ihres Diabetes Managements zeitnah durchzuführen. Erinnerungen sind gesondert in (Accu-Chek Solo Mikropumpensystem) 14.2. Überblick über Erinnerungen erklärt. |
| Warngrenzwerte | Festlegung der Warngrenzwerte für Überzuckerung (Hyper), Unterzuckerung (Hypo) usw. |
| Uhrzeit und Datum | Ein korrekt eingestelltes Datum und eine korrekt eingestellte Uhrzeit gewährleisten, dass Insulin immer zum richtigen Zeitpunkt abgegeben wird. |
| Boluseinstellungen | Parameter für die Bolusabgabe und den Quick-Bolus. Einen besseren Überblick über die Einstellungen des Bolusvorschlags in diesem Menü finden Sie in (Accu-Chek Solo Mikropumpensystem) Kapitel 9.4. |
| Zeitabschnitte | Einstellung von Anfangszeiten, Endezeiten sowie Zielbereichen, Kohlenhydratfaktoren und Korrekturfaktoren. Ist der Bolusvorschlag aktiviert, können Sie die Einstellungen für die Zeitabschnitte im Menü „Bolusvorschlag“ abrufen. Siehe (Accu-Chek Solo Mikropumpensystem) Kapitel 9.10. |
| Ton und Vibration | <ul style="list-style-type: none"> • Lautstärke • Vibration • Tonsignal für die Blutzuckermessung • Systemmeldungen • Insulinabgabe • Einstellungen des Touchscreens • Signaltonunterbrechung |
| Allgemeine Einstellungen | <ul style="list-style-type: none"> • Sprache • Helligkeit • Systemfunktionstest |
| Displaysperre | Schützt den Diabetes Manager vor unbeabsichtigten Änderungen und Einträgen. |

| | |
|----------------------------|---|
| Systeminformationen | Technische Informationen, die hauptsächlich für Gespräche mit dem Kundendienst relevant sind. |
| Injektionsmodus | Modus für die intensivierte herkömmliche Insulintherapie, bei der schnell wirkendes Bolusinsulin und langsam wirkendes Basalinsulin (Depotinsulin) mithilfe eines Insulinpens oder einer Insulinspritze verabreicht werden. |

Hinweis

Wenn Sie eine Einstellung bearbeiten, werden alle nicht gespeicherten Änderungen verworfen, sobald sich der Diabetes Manager ausschaltet oder ein Teststreifen in den Teststreifeneinschub eingeführt wird.

Warnung

Die Therapieeinstellungen müssen von Ihrem Arzt bereitgestellt werden und dürfen nur nach Absprache mit diesem geändert werden. Mit falschen Einstellungen besteht das Risiko eine Über- oder Unterzuckerung.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den hier angeführten Produkten um Medizinprodukte zur Anwendung für Patienten handelt.

Vor Gebrauch dieser Produkte muss die Gebrauchsinformation beachtet und ärztlicher Rat eingeholt werden.

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK SOLO, ACCU-CHEK ACADEMY, ACCU-CHEK PERFORMA und ACCU-CHEK SOFTCLIX sind Marken von Roche.

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch Roche erfolgt unter Lizenz.

Alle weiteren Produktnamen und Marken gehören den entsprechenden Eigentümern.

® 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.at

Roche Diabetes Care Austria GmbH
1200 Wien, Handelskai 94-96

Insulinpumpen-Hotline: 01/277 27 – 596

