

MANUEL DE FORMATION


Le système de micropompe Accu-Chek® Solo



MODIFICATION DES RÉGLAGES DU CONSEIL BOLUS

Changement d'options du conseil bolus

Le présent paragraphe décrit la manière de modifier les valeurs d'augmentation après le repas, la taille de l'en-cas, la durée d'action et le délai d'action.

<p>01</p> <p>07:00</p>  <p>Affichage État Ajouter données</p>	<p>02</p> <p>07:00</p> <p>Réglages</p> <ul style="list-style-type: none">RappelsLimites d'avertissementHeure et dateRéglages bolusPlages horairesTonalité et vibrationRéglages généraux
<p>Dans le menu principal, appuyez sur Réglages.</p>	<p>Appuyez sur Réglages bolus.</p>




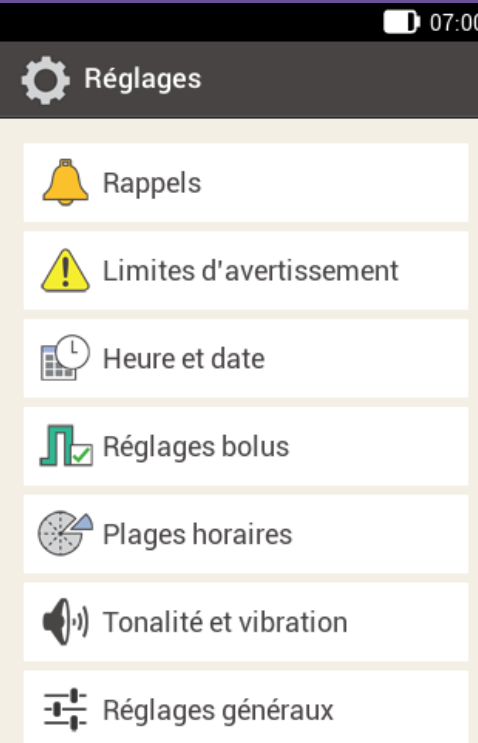
Appuyez sur [Réglages du conseil bolus](#).



Appuyez sur les options correspondantes pour régler l'augmentation après le repas, la taille de l'en-cas, la durée d'action et le délai d'action.


Appuyez sur [Terminé](#) après avoir défini tous les réglages.

Modification des pourcentages pour les événements de santé


01	02
 <p>The screenshot shows a main menu with a grid of icons. The 'Réglages' icon (a gear) is highlighted with a dark background. Other icons include Bolus, Débit de base, Arrêt, Mesurer, Remplacer, Régler, Mes données, USB, Mode avion, Signaux, and Aide. At the bottom, there are three buttons: 'Affichage État', 'Ajouter données', and 'Ajouter données'.</p>	 <p>The screenshot shows the 'Réglages' menu with a list of options. 'Réglages bolus' is highlighted with a dark background. Other options include Rappels, Limites d'avertissement, Heure et date, Plages horaires, Tonalité et vibration, and Réglages généraux.</p>
<p>Dans le menu principal, appuyez sur Réglages.</p>	<p>Appuyez sur Réglages bolus.</p>



Appuyez sur [Événements de santé](#).

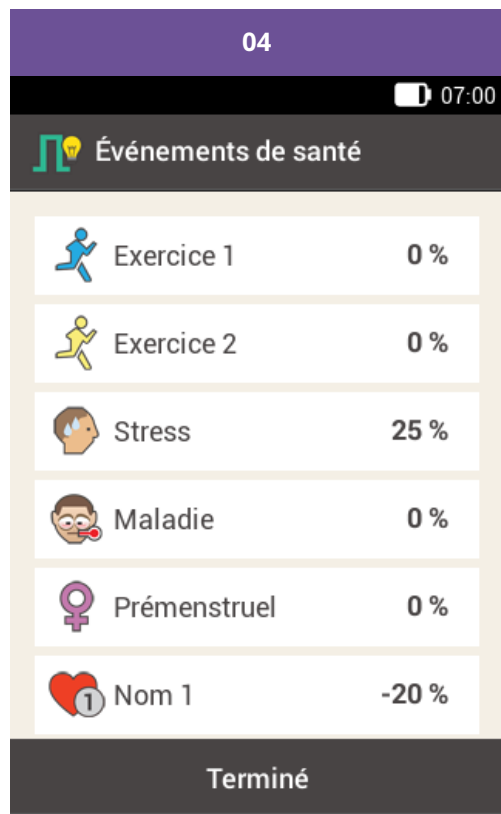


Appuyez sur l'événement de santé pour lequel vous souhaitez procéder à des réglages (par ex. *Stress*).

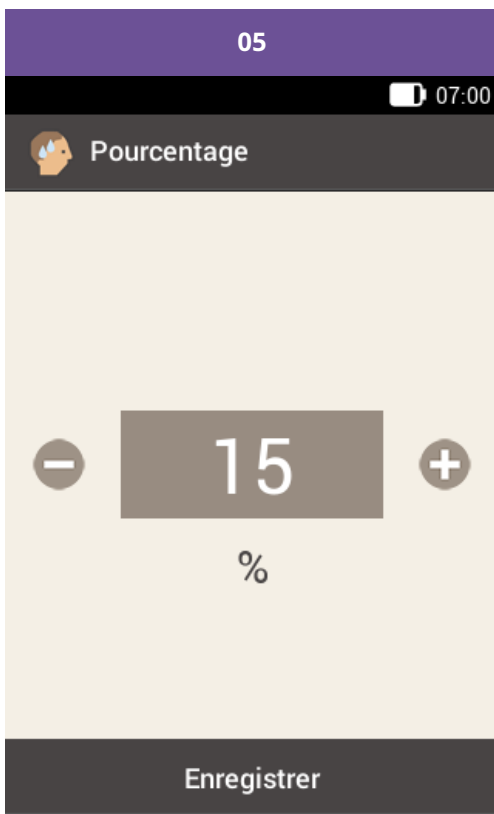

Saisissez un pourcentage pour l'événement de santé sélectionné.

Appuyez sur [Enregistrer](#).

Répétez les étapes 4 et 5 pour régler le pourcentage d'autres événements de santé.

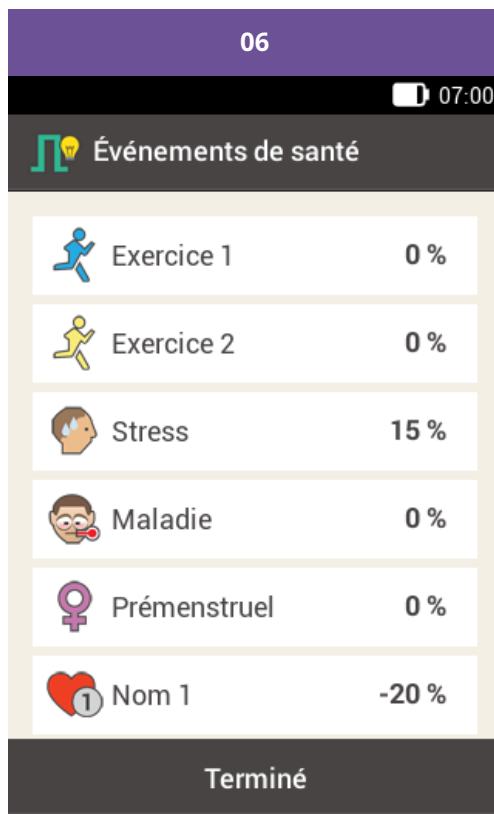

Les événements de santé sont affichés avec les pourcentages définis correspondants.

Appuyez sur [Terminé](#).

APERÇU DES RÉGLAGES

Le menu Réglages vous propose les options suivantes pour ajuster le système de la micropompe :

Réglage	Explication
Rappels	Réglage destiné à vous aider à vous rappeler les tâches relatives à votre gestion du diabète. Les rappels sont expliqués individuellement dans la rubrique (Système de micropompe Accu-Chek Solo) Chapitre 14.2.
Limites d'avertissement	Définition des limites d'avertissement pour l'hyperglycémie (hyper), l'hypoglycémie (hypo) et d'autres.
Heure et date	Le réglage approprié de l'heure et de la date garantit l'administration en temps utile de l'insuline.
Réglages de bolus	Paramètres pour l'administration d'un bolus et pour le bolus direct. Pour un meilleur aperçu des réglages du Conseil bolus dans ce menu, voir les explications dans la rubrique (Système de micropompe Accu-Chek Solo) Chapitre 9.4.
Plages horaires	Réglage des heures de début, heures de fin, plages horaires, ratios glucidiques et sensibilités à l'insuline. Une fois le Conseil bolus activé, il est possible d'accéder aux réglages des Plages horaires dans le menu Conseil bolus. Voir la rubrique (Système de micropompe Accu-Chek Solo) Chapitre 9.12.
Tonalité et vibration	<ul style="list-style-type: none"> • Volume • Vibration • Tonalité pour la mesure de glycémie • Messages du système • Administration d'insuline • Réglage de l'écran tactile • Suspension du signal
Réglages généraux	<ul style="list-style-type: none"> • Langue • Luminosité • Test de fonctionnement du système
Verrouillage de l'écran	

	Protection de la télécommande de gestion du diabète contre toute modification ou saisie accidentelle.
Informations du système	Informations techniques essentiellement utilisées pendant la communication avec le service clientèle dédié à la pompe.
Mode d'injection	Mode de traitement par insulinothérapie conventionnelle intensifiée en cas d'administration d'insuline de bolus à action rapide et d'insuline basale à action lente (insuline à action prolongée) avec un stylo ou une seringue à insuline.

Note

Lors de la modification d'un réglage, toutes les modifications non enregistrées sont annulées dès la mise à l'arrêt de la télécommande de gestion du diabète ou dès l'insertion d'une bandelette réactive dans la fente d'insertion de la bandelette réactive.

Avertissement

Votre professionnel de santé doit définir les réglages des paramètres personnels. Vous devez consulter son avis avant de procéder à une modification quelconque. Des réglages erronés risquent d'entraîner une hyperglycémie ou une hypoglycémie.

Approuvé / listé / enregistré sous le nom du produit:
Système de micropompe Accu-Chek Solo

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK
SMART PIX,
ACCU-CHEK SOLO et FASTCLIX sont des marques de Roche.

Le nom et les logos Bluetooth® sont des marques déposées du groupe
Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par Roche est soumise
à un contrat de licence.

Les autres marques ou noms de produits mentionnés ici sont des marques
commerciales de leurs propriétaires respectifs.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

