

# TRAININGS- HANDBOEK

Accu-Chek® Solo-micropompsysteem





# BASALE PROFIELEN AANPASSEN EN TOEVOEGEN

## De reden achter verschillende basale profielen

Naast uw eerste basale profiel, wilt u misschien nog andere basale profielen voor verschillende dagelijkse routines gebruiken. U kunt maximaal 5 verschillende basale profielen programmeren. Bespreek het gebruik van verschillende basale profielen met uw arts of behandelteam.

### Voorbeeld

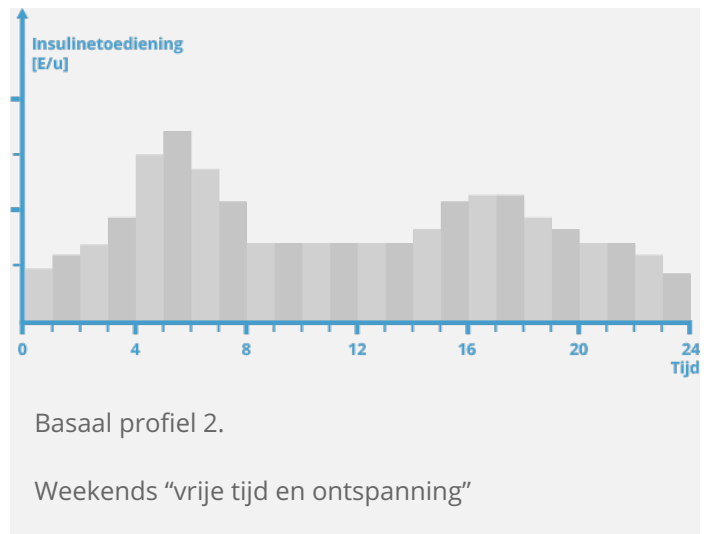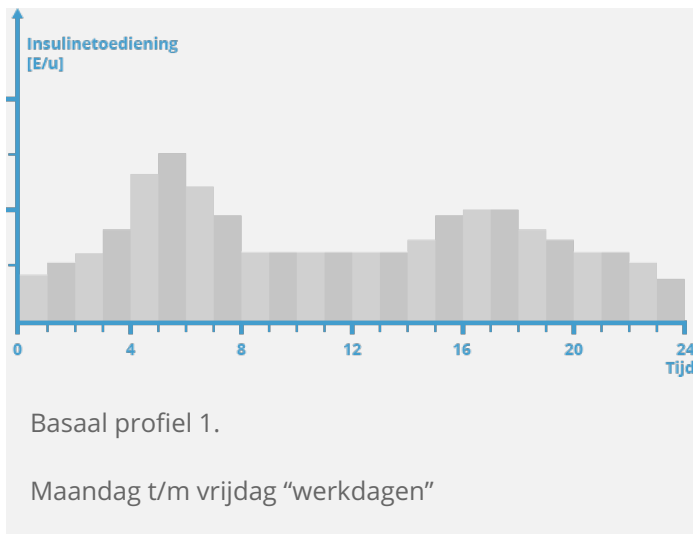

In dit voorbeeld is de gebruiker een bouwvakker die van maandag tot en met vrijdag van 's ochtends vroeg tot het einde van de werkdag op zijn voeten staat. In het weekend slaapt hij graag uit en vindt hij het fijn om urenlang te ontspannen en te lezen. Na de bespreking van zijn wisselende dagelijkse routines met zijn arts, stelde de gebruiker Basaal profiel 1 in voor werkdagen. Hij programmeerde ook Basaal profiel 2 dat meer basale insuline verstrekt voor zaterdag en zondag.

## Een basaal profiel programmeren

01

07:00

07:00

**106** mg/dL  
06:55, 29 Mar 2018

**150 U**

Profiel 1  
**1,20 U/h**

Nieuwe bolus +

Bolus Basale dos. Stop

Meten Vervangen Instellingen

Mijn gegevens. USB Vliegtuigmod

Ak. signalen Help

Hoofd-menu Gegevens toevoegen

Status-scherm Gegevens toevoegen

Tik in het statusscherm op het basale profiel.


Tik in het hoofdmenu op [Basale dosering](#).

02

07:00

 Basale dosering

 Tijdelijke basale dosering

 Basale profielen

Tik op [Basale profielen](#).

03

07:00


 Basale profielen




 **Profiel 1**  
**Totale hoeveelheid 12,0 U**

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Tik op **+** om een basaal profiel toe te voegen.

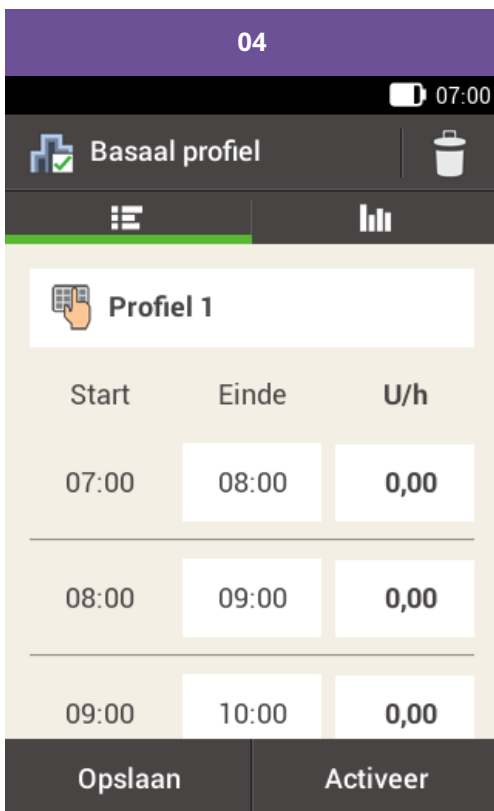

Tik op om het profiel een naam te geven.

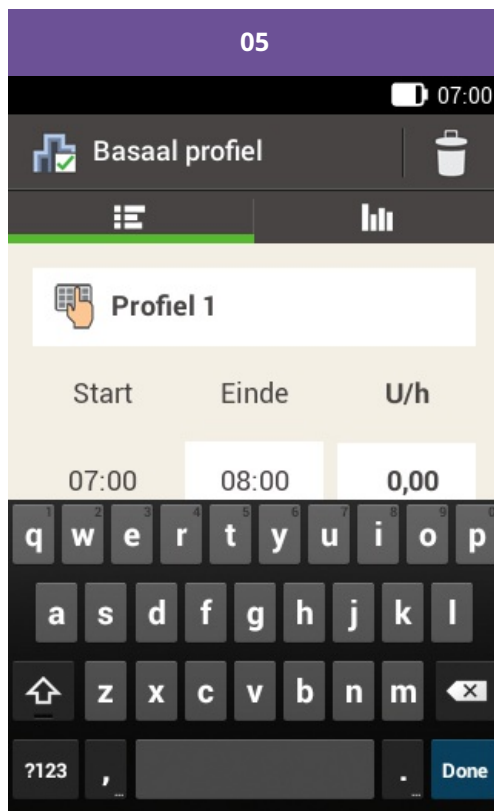

Voer de gewenste naam voor het basale profiel in (maximaal 12 karakters).

Tik vervolgens op [Gereed](#).

06

07:00

Basaal profiel

Profil 2

Start	Einde	U/h
07:00	08:00	0,00
08:00	09:00	0,00
09:00	10:00	0,00

Opslaan      Activeer

Selecteer het eerste tijdsblok.

07

07:00

Eindtijd

08 : 30

OK

Voer de eindtijd voor het tijdsblok in.

Tik op Opslaan.


### **i** Opmerking

U kunt alleen de eindtijd van de tijdsblokken van basale doseringen bewerken. De starttijd van ieder tijdsblok is identiek aan de eindtijd van het voorafgaande tijdsblok.

Om een tijdsblok te verwijderen, moet u de eindtijd van het tijdsblok instellen op de starttijd van hetzelfde tijdsblok.

Om een nieuw tijdsblok toe te voegen, stelt u de eindtijd van het laatste tijdsblok in op de gewenste starttijd voor het nieuwe tijdsblok.

De tijdsblokken van basale doseringen komen niet overeen met de tijdsblokken van bolusadviezen en worden hier ook niet voor gebruikt.

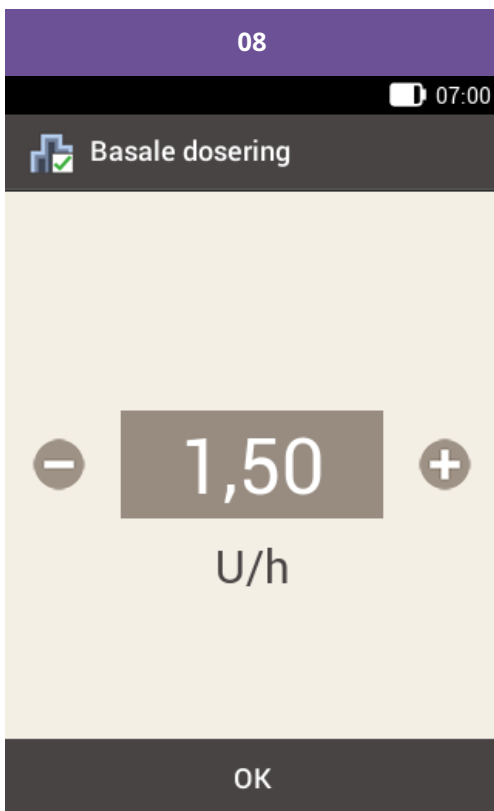


Voer de insulinehoeveelheid per uur in voor het tijdsblok.

Tik op [Opslaan](#).

Ga door met het invoeren van de eindtijden en basale doseringen voor een tijdsperiode van één uur tot u de juiste basale doseringen voor een tijdsperiode van één uur voor alle 24 uren van de dag heeft ingesteld.

Als u wilt opslaan maar dit basale profiel niet gelijk wilt activeren, ga dan door met stap 09.

Als u wilt opslaan en het nieuwe basale profiel direct wilt activeren, tik dan op "Activeren". Ga verder met stap 11.

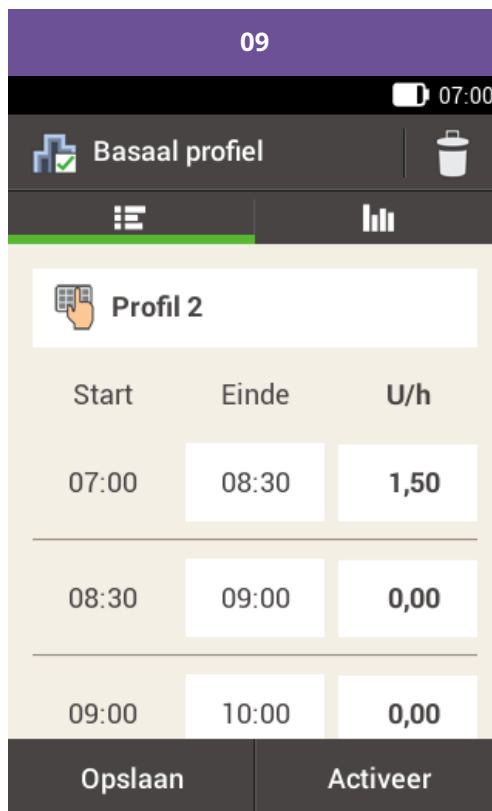

Tik op [Opslaan](#) om het ingestelde basale profiel op te slaan.



Basale profielen



Profiel 1

**Totale hoeveelheid 12,0 U**

Profiel 2

**Totale hoeveelheid 16,0 U**

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Het nieuw ingestelde basale profiel wordt in het overzicht van de beschikbare basale profielen weergegeven. Zorg ervoor dat de weergegeven totale hoeveelheid overeenstemt met de door uw zorgverlener aangegeven totale hoeveelheid basale insuline. Het basale profiel zal echter niet automatisch geactiveerd worden.

Zie de volgende sectie over hoe een basaal profiel geactiveerd moet worden.



## Een basaal profiel activeren

Activeer het juiste profiel wanneer het aan de beurt is. Zo activeert u op vrijdagavond, als u overschakelt op uw weekendroutines, het profiel dat u voor de weekenden heeft geprogrammeerd.


The image shows two side-by-side screenshots of a diabetes management application. The left screenshot displays a glucose reading of 106 mg/dL at 06:55 on 29 Mar 2018, with a basal rate of 1.20 U/h for 'Profiel 1'. The right screenshot shows a main menu with various icons and labels: Bolus, Basale dos., Stop, Meten, Vervangen, Instellingen, Mijn gegevens, USB, Vliegtuigmod, Ak. signalen, and Help. Below the screenshots, there are two text boxes providing instructions: 'Tik in het statusscherm op het basale profiel.' and 'Tik in het hoofdmenu op Basale dosering.'


Tik in het statusscherm op het basale profiel.


Tik in het hoofdmenu op Basale dosering.

02

07:00

 Basale dosering

 Tijdelijke basale dosering

 Basale profielen

Tik op **Basale profielen**.

03

07:00

 Basale profielen 


 **Profiel 1**  
**Totale hoeveelheid 12,0 U**

 **Profiel 2**  
**Totale hoeveelheid 16,0 U**

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Het actueel actieve basale profiel herkent u aan .


Tik op het basale profiel dat u wilt activeren.

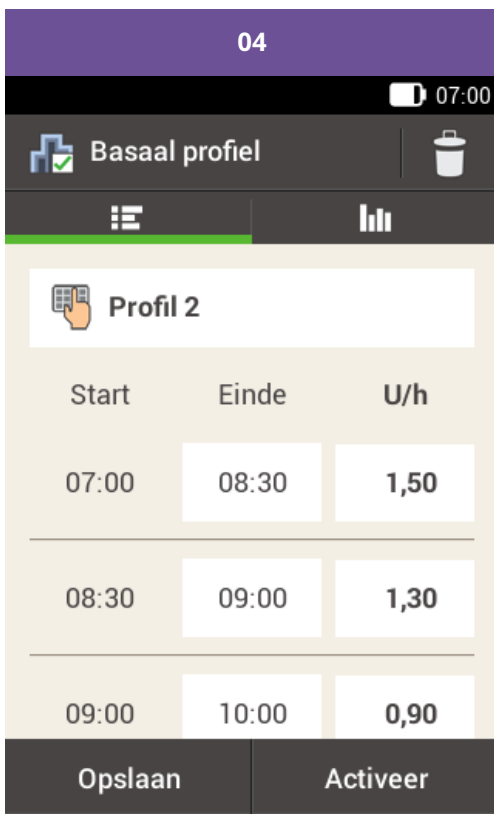

Scroll het scherm eventueel naar boven om alle tijdsblokken van het basale profiel te zien.


Tik op als u de grafiek voor het profiel wilt zien.

Tik op [Activeren](#).

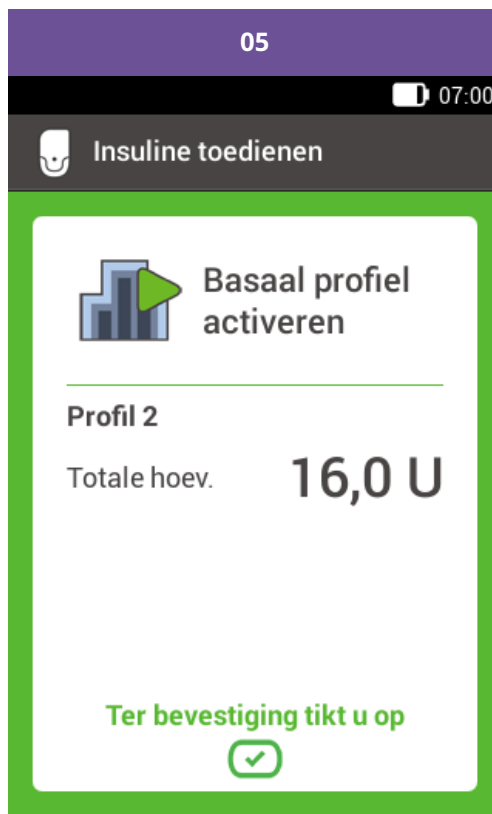

Druk om te bevestigen op de insulinetoets .

06

 07:00

**106** mg/dL

06:55, 08 mrt. 2017



**150 U**

Profiel 1

**1,50 U/h**

Nieuwe bolus



Hoofd-  
menu



Gegevens  
toevoegen

Het geactiveerde basale profiel wordt op het statusscherm weergegeven.

## Een basaal profiel wijzigen

**01**


Basale profielen

Profiel 1  
Totale hoeveelheid 12,0 U

Profiel 2  
Totale hoeveelheid 16,0 U

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Tik op het basale profiel dat u wilt wijzigen (bijv. Profiel 2).

Het actueel actieve basale profiel herkent u aan .

**02**

Basaal profiel

Profil 2

Start	Einde	U/h
07:00	08:30	1,50
08:30	09:00	1,30
09:00	10:00	0,90

Opslaan      Activeer

Tik op een eindtijd om de eindtijd voor het tijdsblok te wijzigen.

Tik op een basale dosering om de basale dosering voor het tijdsblok te wijzigen.

Herhaal deze procedure tot voor de volledige 24 uur van de dag de correcte basale dosering ingesteld is.

Tik op Opslaan.

### **Opmerking**

Scroll het scherm eventueel naar boven om alle tijdsblokken van het basale profiel te kunnen controleren.



Basale profielen



Profiel 1

**Totale hoeveelheid 12,0 U**

Profiel 2

**Totale hoeveelheid 16,0 U**

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Het gewijzigde basale profiel wordt in het overzicht van de beschikbare basale profielen weergegeven.

Controleer of de weergegeven totale hoeveelheid overeenstemt met de door uw zorgverlener aangegeven totale hoeveelheid.

## Een basaal profiel verwijderen

01

07:00

07:00

**106** mg/dL  
06:55, 29 Mar 2018

**150 U**

Profiel 1  
**1,20 U/h**

Nieuwe bolus +

Bolus Basale dos. Stop

Meten Vervangen Instellingen

Mijn gegev. USB Vliegtuigmod

Ak. signalen Help


Hoofd-menu Gegevens toevoegen Status-scherm Gegevens toevoegen


Tik in het statusscherm op het basale profiel.


Tik in het hoofdmenu op [Basale dosering](#).

02

07:00

 Basale dosering

 Tijdelijke basale dosering

 Basale profielen

Tik op Basale profielen.

03

07:00

 Basale profielen 

 Profiel 1  
**Totale hoeveelheid 10,0 U**


 Profiel 2  
**Totale hoeveelheid 14,0 U**


 Profiel 3  
**Totale hoeveelheid 18,0 U**

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Tik op het basale profiel dat u wilt verwijderen (bijv. basaal profiel 3).



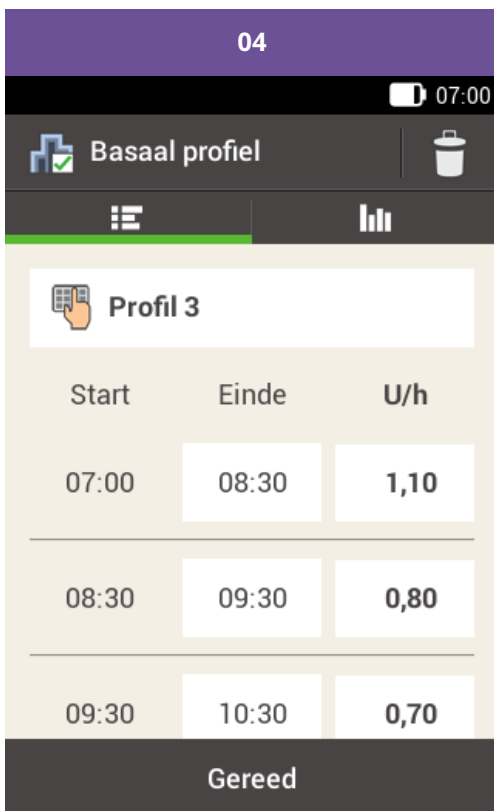

Tik op  in de rechter bovenhoek van het scherm.



Als het actieve basale profiel verwijderd moet worden, wordt de volgende display weergegeven.

Tik op Ja.



Basale profielen



Profiel 1

**Totale hoeveelheid 10,0 U**

Profiel 2

**Totale hoeveelheid 14,0 U**

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Het geselecteerde basale profiel is uit de lijst verwijderd.

Toegelaten/ingeschreven/geregistreerd onder de productnaam:  
Accu-Chek Solo-micropompsysteem

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK  
SMART PIX, ACCU-CHEK SOLO en FASTCLIX zijn merken van Roche.

De merknaam en logo's Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken  
van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken door Roche is  
een licentie verkregen.

Alle overige productnamen en handelsmerken zijn het eigendom van hun  
respectieve eigenaars.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH  
Sandhofer Strasse 116  
68305 Mannheim, Duitsland  
[www.accu-chek.com](http://www.accu-chek.com)

