

# KOULUTUS- KÄSIKIRJA

Accu-Chek® Solo -mikropumpujärjestelmät



# AIKAJAKSOJEN SÄÄTÄMINEN

## Aikajakson muokkaaminen

**01**

07:00

Bolus Basaali Pysäytys

Mittaus Vaihto Asetukset

Omat tiedot USB Lentotila

Signaalit Ohje

Tilanäyttö Lisää tietoja

Napauta päävalikossa kohtaa Asetukset.

**02**

07:00

Asetukset

Muistutukset

Varoituksen raja-arvot

Kellonaika ja päivämäärä


Bolusasetukset

Aikajaksot

Ääni ja värinä

Yleiset asetukset

Napauta kohtaa Aikajaksot.

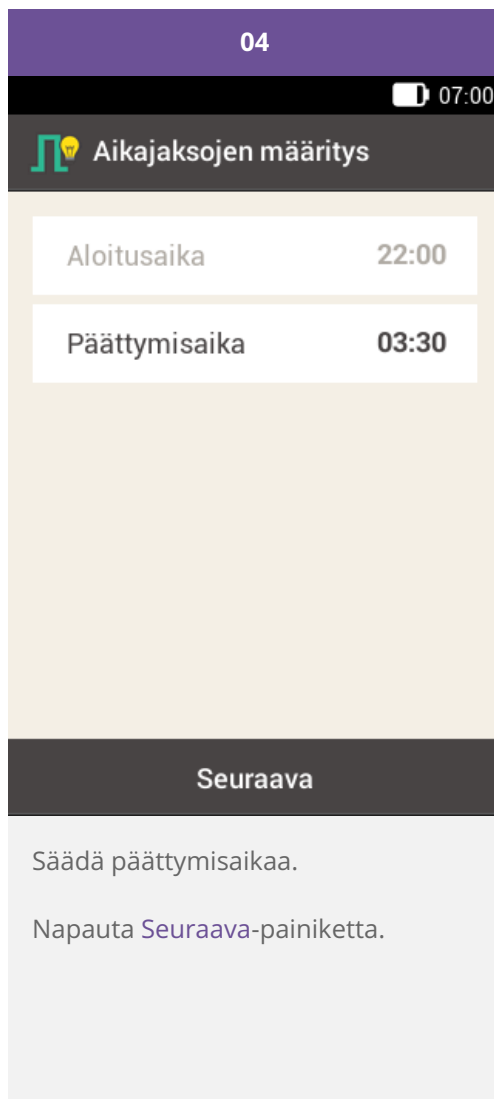

05

07:00

Tavoitealue

Yläraja	7,5 mmol/L
Alaraja	3,6 mmol/L

**Seuraava**

Säädä ylärajaa ja alarajaa.  
Napauta [Seuraava](#)-painiketta.

06

07:00

Bolusehdotusasetukset

Hiilihydraattisuhde

1,00 U	:	14 g
--------	---	------

Insuliiniherkkyys

1,00 U	:	2,8 mmol/L
--------	---	------------

Tämä hiilihydraattisuhde ja tämä insuliiniherkkyys otetaan nyt käyttöön kaikissa aikajaksoissa. Voit muuttaa jokaisen aikajakson arvoja myöhemmin.

**Valmis**

Säädä hiilihydraattisuhdetta ja insuliiniherkkyttä.  
Napauta [Valmis](#)-painiketta.

 Aikajaksot

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 22:00

22:00 – 05:30

**Valmis**


Kun olet muokannut kaikki haluamasi aikajaksot, napauta [Valmis-painiketta](#).


## Aikajakson lisääminen

Tässä kappaleessa kuvataan, miten uusi aikajakso lisätään.


Lisää uusi aikajakso pienentämällä viimeisen aikajakson päättymisaikaa.

Kun olet luonut uuden aikajakson, voit joutua muuttamaan jokaisen aikajakson päättymisaikaa ja muita tietoja.

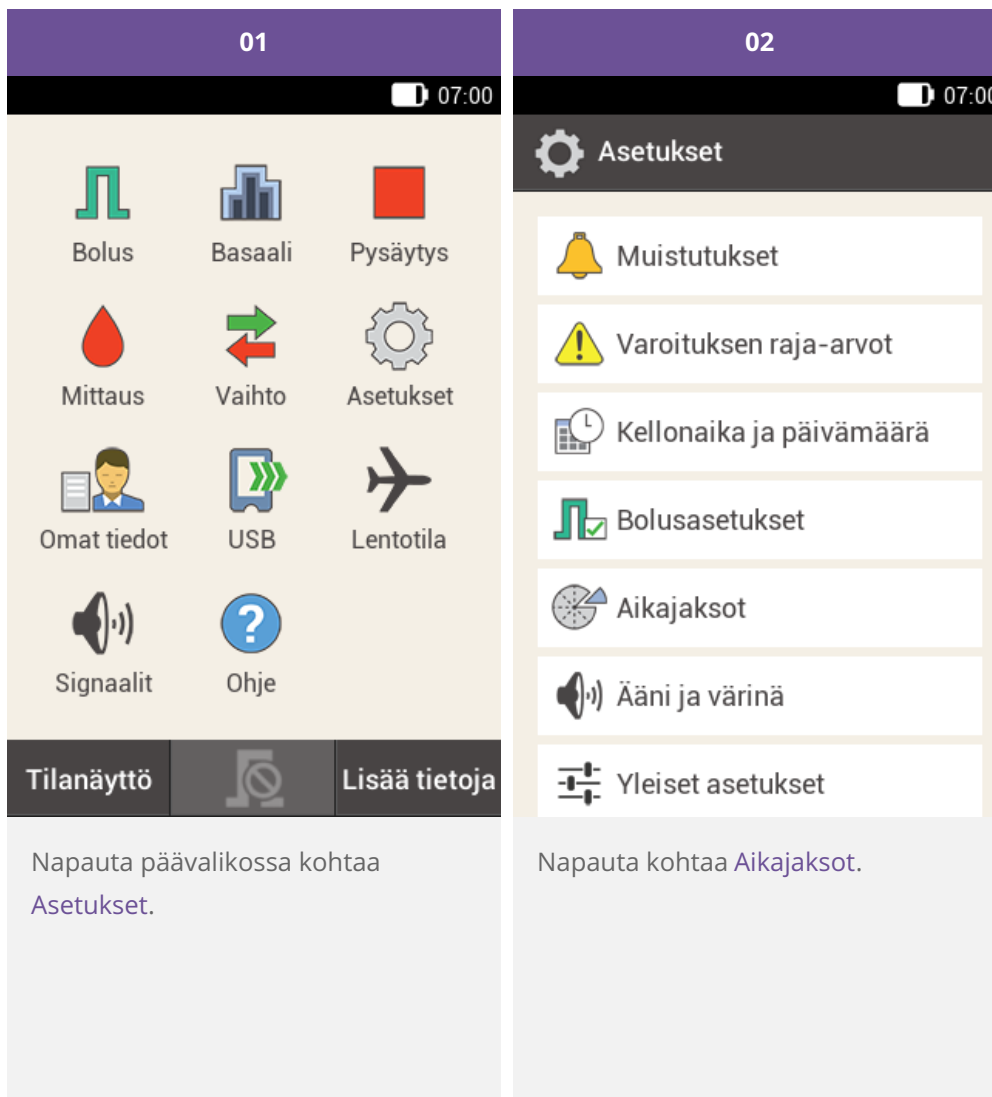

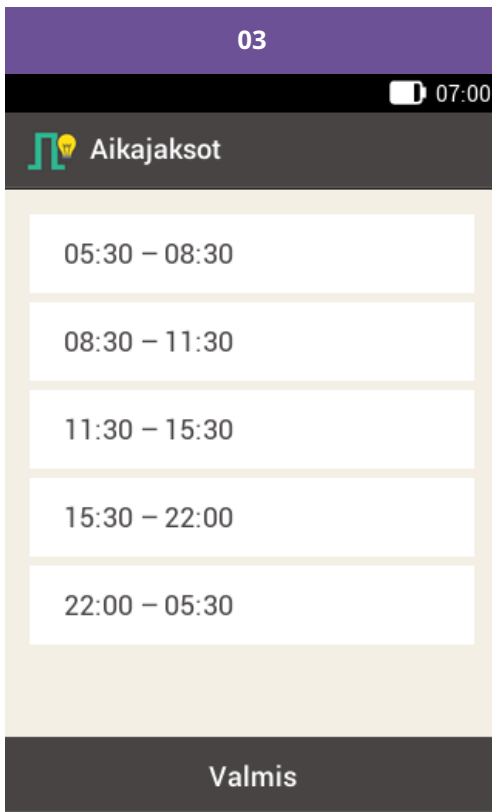

Napauta viimeistä aikajaksoa.

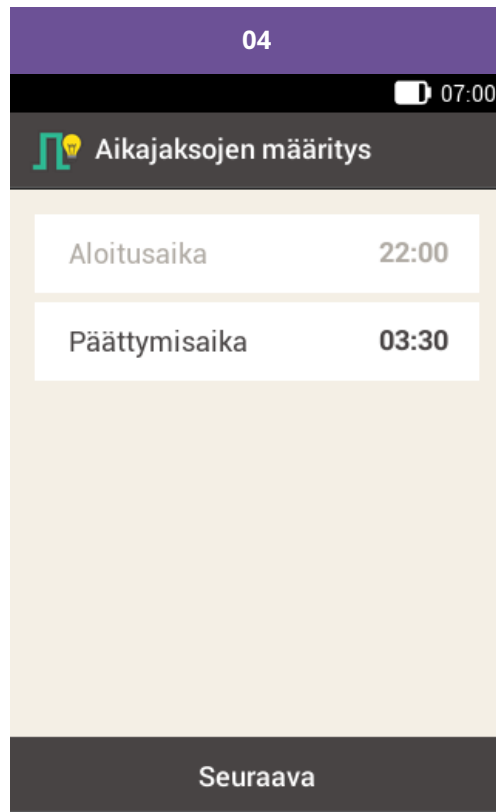

Napauta kohtaa Päätymisaika ja luo uusi aikajakso pienentämällä päätymisaikaa. Älä pienennä päätymisaikaa kuitenkaan niin paljon, että se on sama kuin aloitusaika, sillä siinä tapauksessa aikajakso poistetaan.

Napauta [Seuraava](#)-painiketta.

05

07:00

Tavoitealue

Yläraja	8,0 mmol/L
Alaraja	4,2 mmol/L

**Seuraava**

Aseta uuden aikajakson yläraja ja alaraja.

Napauta [Seuraava](#)-painiketta.

06

07:00

Bolusehdotusasetukset

Hiilihydraattisuhde

1,00 U	:	14 g
--------	---	------

Insuliiniherkkyys

1,00 U	:	2,5 mmol/L
--------	---	------------

Tämä hiilihydraattisuhde ja tämä insuliiniherkkyys otetaan nyt käyttöön kaikissa aikajaksoissa. Voit muuttaa jokaisen aikajakson arvoja myöhemmin.

**Valmis**

Aseta uuden aikajakson hiilihydraattisuhde ja insuliiniherkkyys.

Napauta [Valmis](#)-painiketta.



 Aikajaksot

05:30 – 08:30

08:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 03:30

03:30 – 05:30

**Valmis**


Voit joutua muuttamaan muiden aikajaksojen päättymisaikoja ja asetuksia.


Kun olet muokannut kaikki haluamasi aikajaksot, napauta **Valmis**-painiketta.

## Kaikkien aikajaksojen palauttaminen


Tässä kappaleessa kuvataan, miten kaikkien aikajaksojen asetukset voi palauttaa tehdasasetuksiin ja miten asetukset voi syöttää uudelleen.

Kaikki aikajaksot voi joutua palauttamaan silloin, jos halutaan muuttaa ensimmäisen aikajakson aloitusaikaa.

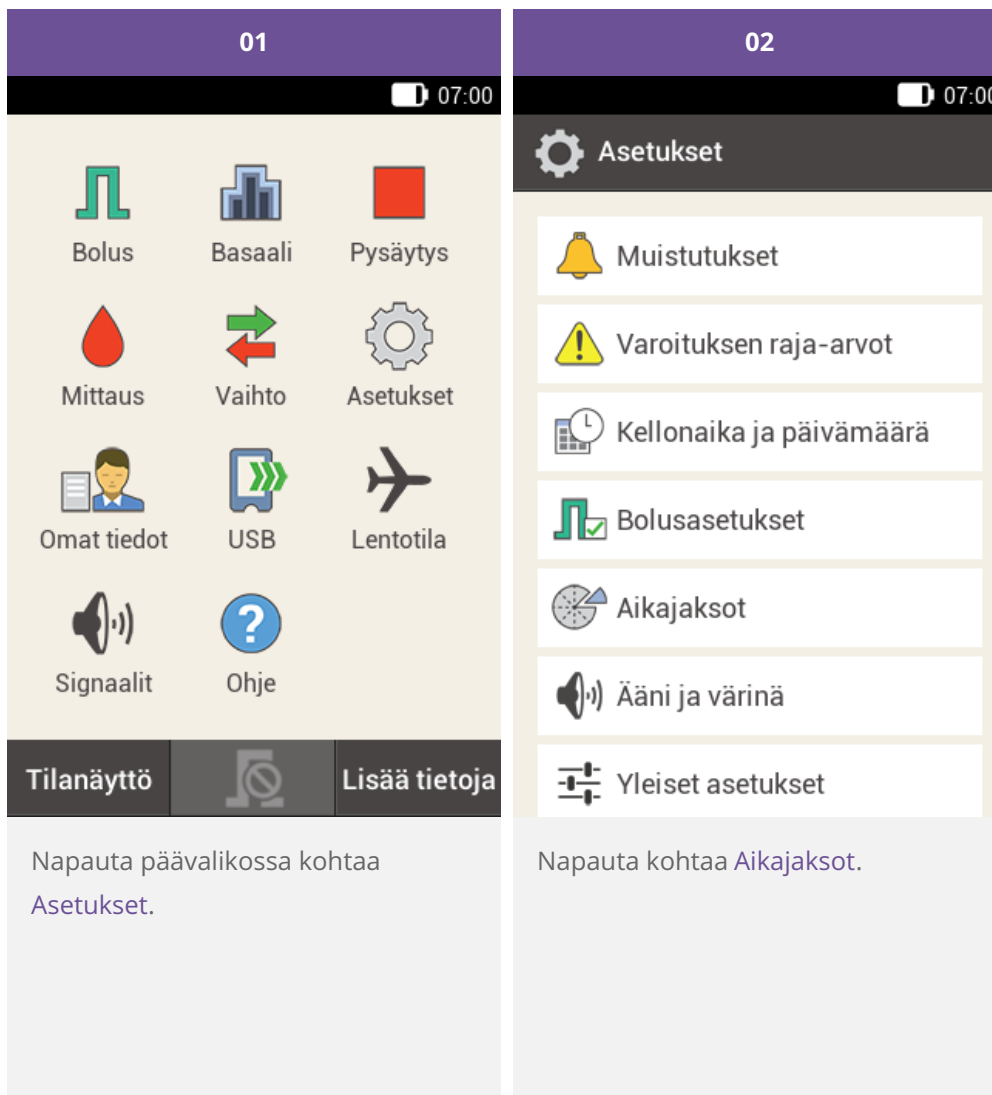

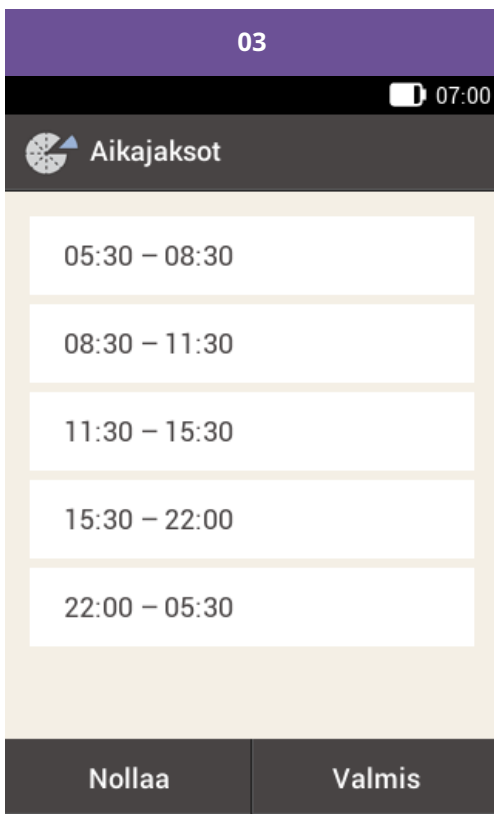

Napauta [Nollaa](#)-painiketta.

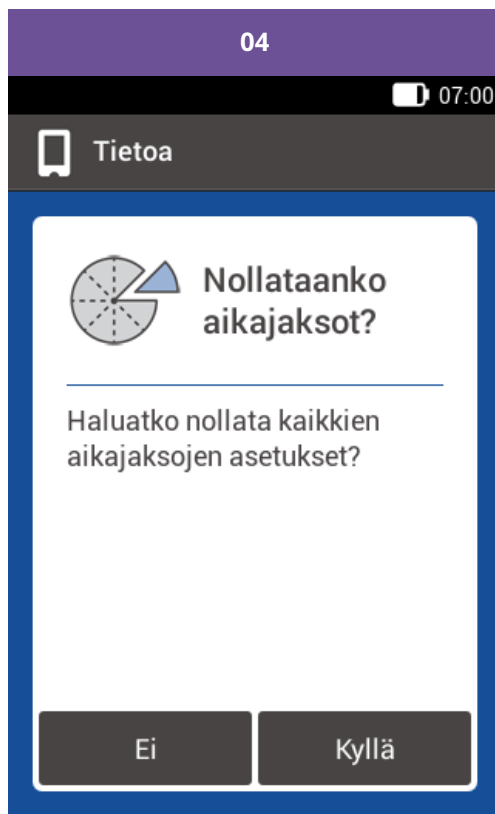

Jos haluat palauttaa kaikki aikajaksot, napauta [Kyllä](#)-painiketta.

05

07:00

Ensimmäinen aikajakso

Aloitusaika	06:30
Päätymisaika	09:30

**Valmis**

Aseta ensimmäisen aikajakson aloitusaika ja päätymisaika.

Napauta **Valmis**-painiketta.

06

07:00

Tavoitealue

Yläraja	7,8 mmol/L
Alaraja	3,9 mmol/L

**Valmis**

Aseta ylärajan ja alarajan oletusarvot.

Napauta **Valmis**-painiketta.

07

07:00

 Bolusehdotusasetukset

Hiilihydraattisuhde

1,00 U : 10 g

Insuliiniherkkyys

1,00 U : 2,2 mmol/L

Tämä hiilihydraattisuhde ja tämä insuliiniherkkyys otetaan nyt käyttöön kaikissa aikajaksoissa. Voit muuttaa jokaisen aikajakson arvoja myöhemmin.


Valmis

Aseta hiilihydraattisuhteen ja insuliiniherkkyden oletusarvot.

Napauta [Valmis](#)-painiketta.

08

07:00

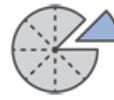 Tietoa


## Aikajaksojen määrittäminen

Ensimmäisen aikajakson tavoitealue ja perusasetukset otettiin käyttöön kaikissa muissa aikajaksoissa. Voit muuttaa yksittäisten aikajaksojen asetuksia myöhemmin.

OK

Napauta [OK](#)-painiketta.

 Aikajaksot

06:30 – 09:30

09:30 – 11:30

11:30 – 15:30

15:30 – 22:00

22:00 – 05:30

Nollaa

Valmis

Voit joutua muuttamaan muiden aikajaksojen päättymisaikoja ja asetuksia.

Kun olet muokannut kaikki haluamasi aikajaksot, napauta **Valmis**-painiketta.

# ASETUSTEN ESITTELY

Asetukset-valikossa on seuraavat mikropumppujärjestelmän asetukset:

Asetus	Kuvaus
<b>Muistutukset</b>	Auttavat muistamaan diabeteksen hallinnan tehtävät. Muistutukset on kuvattu erikseen kohdassa <a href="#">(Accu-Chek Solo -mikropumppujärjestelmä) 14.2. Muistutusten esittely</a> .
<b>Varoituksen raja-arvot</b>	Hyperglykemian (hyper) ja hypoglykemian (hypo) rajojen sekä muiden rajojen määrittäminen.
<b>Kellonaika ja päivämäärä</b>	Kellonajan ja päivämäärän asettaminen oikein varmistaa, että laite annostelee insuliinin oikeaan aikaan vuorokaudesta.
<b>Bolusasetukset</b>	Boluksen annostelun ja pikaboluksen parametri.  Tämän valikon bolusehdotusasetuksista on yhteenveto kohdassa <a href="#">(Accu-Chek Solo -mikropumppujärjestelmä) Luku 9.4</a> .
<b>Aikajaksot</b>	Määritä alkamisajat, päättymisajat sekä tavoitealueet, hiilihydraattisuhteet ja insuliiniherkkyydet.  Kun bolusehdotus on käytössä, aikajakson asetukset löytyvät Bolusehdotus-valikosta. Katso <a href="#">(Accu-Chek Solo -mikropumppujärjestelmä) Luku 9.12</a> .
<b>Ääni ja värinä</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Äänenvoimakkuus</li> <li>• Värinä</li> <li>• Verensokerin mittauksen äänimerkki</li> <li>• Järjestelmän ilmoitukset</li> <li>• Insuliinin annostelu</li> <li>• Kosketusnäytön asetus</li> <li>• Signaalin keskeytys</li> </ul>
<b>Yleiset asetukset</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kieli</li> <li>• Kirkkaus</li> <li>• Järjestelmän toimintotesti</li> </ul>
<b>Näytön lukitus</b>	Suojaa diabetesmanageria tahattomilta muutoksilta ja kirjauksilta.
<b>Järjestelmän tiedot</b>	Tekniset tiedot, joita käytetään pääasiassa oltaessa yhteydessä pumpputukeen.
<b>Pistostila</b>	Tehokkaan perinteisen insuliinihoidon tila, jossa lyhytvaikutteista bolusinsuliinia ja pitkävaikutteista basaali-insuliinia (depot-insuliinia) annetaan kynällä tai ruiskulla.



## **Huomautus**

Muokatessasi asetusta tallentamattomat muutokset hylätään, jos diabetesmanageri sammuu tai jos testiliuska työnnetään testiliuskanpidikkeeseen.

## **Varoitus**

Hoitoasetusten määrittäminen kuuluu terveydenhuollon ammattilaisen tai hoitotiimin tehtäviin, ja sinun on keskusteltava heidän kanssaan, ennen kuin teet niihin mitään muutoksia. Väärien asetusten käyttäminen aiheuttaa hyper- tai hypoglykemian vaaran.

Hyväksytty/luetteloitu/rekisteröity tuotenimellä:  
Accu-Chek Solo -mikropumppujärjestelmä

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK  
SMART PIX, ACCU-CHEK SOLO ja FASTCLIX ovat Roehen tavaramerkkejä.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia  
rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Roche käyttää niitä lisenssillä.

Kaikki muut tuotenimet ja tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

© 2021 Roche Diabetes Care

**[www.accu-chek.fi](http://www.accu-chek.fi)**

Maksuton asiakaspalvelunumero 0800 92066

Roche Diabetes Care Suomi

5/2020

