

TRAININGS- HANDBOEK

Accu-Chek® Solo micropomp





BASALE PROFIELEN AANPASSEN EN TOEVOEGEN

De reden achter verschillende basale profielen

Naast uw eerste basale profiel, wilt u misschien nog andere basale profielen voor verschillende dagelijkse routines gebruiken. U kunt maximaal 5 verschillende basale profielen programmeren. Bespreek het gebruik van verschillende basale profielen met uw arts of behandelteam.

Voorbeeld

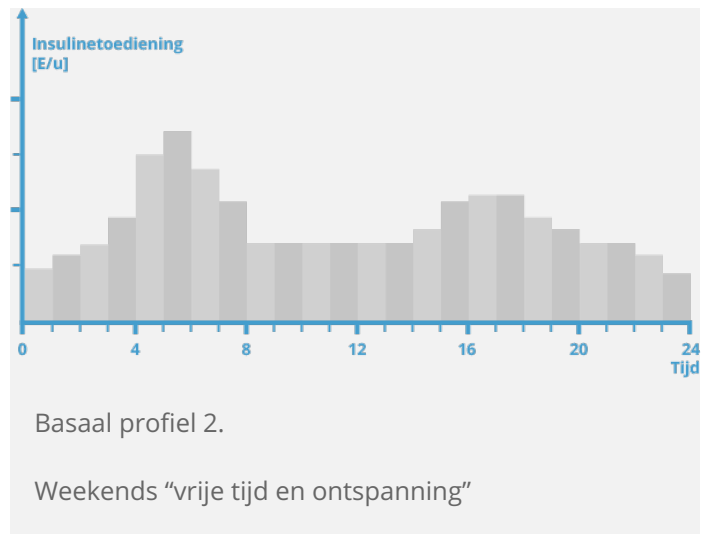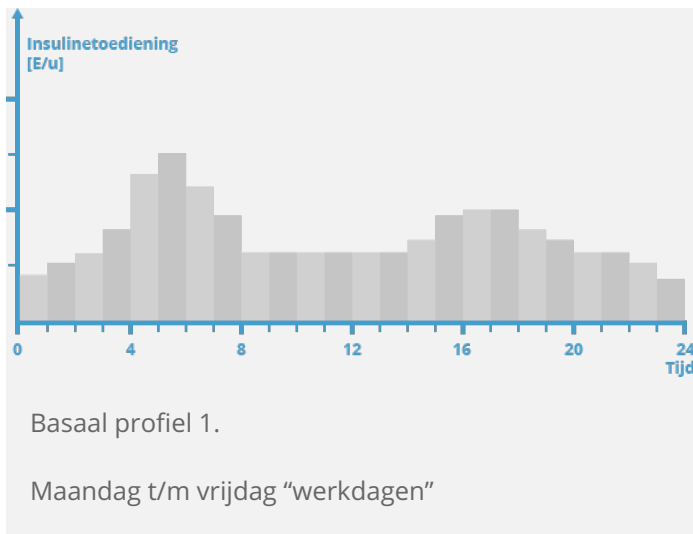

In dit voorbeeld is de gebruiker een bouwvakker die van maandag tot en met vrijdag van 's ochtends vroeg tot het einde van de werkdag op zijn voeten staat. In het weekend slaapt hij graag uit en vindt hij het fijn om urenlang te ontspannen en te lezen. Na de bespreking van zijn wisselende dagelijkse routines met zijn arts, stelde de gebruiker Basaal profiel 1 in voor werkdagen. Hij programmeerde ook Basaal profiel 2 dat meer basale insuline verstrekt voor zaterdag en zondag.

Een basaal profiel programmeren

The image shows two side-by-side screenshots of a mobile application interface for insulin management. The left screenshot displays a glucose reading of 5,9 mmol/L at 06:55 on 29 Mar 2018, with a basal rate of 1,20 U/h for 'Profiel 1'. The right screenshot shows a grid of icons for various functions: Bolus, Basale dos., Stop, Meten, Vervangen, Instellingen, Mijn gegev., USB, Vliegtuigmod, Ak. signalen, and Help. Below the screenshots are two text boxes providing instructions on how to access the basal dosing function.

01

07:00

5,9 mmol/L
06:55, 29 Mar 2018

150 U

Profiel 1
1,20 U/h

Nieuwe bolus +

o f

Bolus Basale dos. Stop

Meten Vervangen Instellingen

Mijn gegev. USB Vliegtuigmod

Ak. signalen Help

Hoofd-menu Gegevens toevoegen

Status-scherm Gegevens toevoegen


Tik in het statusscherm op het basale profiel.


Tik in het hoofdmenu op [Basale dosering](#).

02

07:00

 Basale dosering

 Tijdelijke basale dosering

 Basale profielen

Tik op [Basale profielen](#).

03

07:00


 Basale profielen




 **Profiel 1**
Totale hoeveelheid 12,0 U

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Tik op **+** om een basaal profiel toe te voegen.

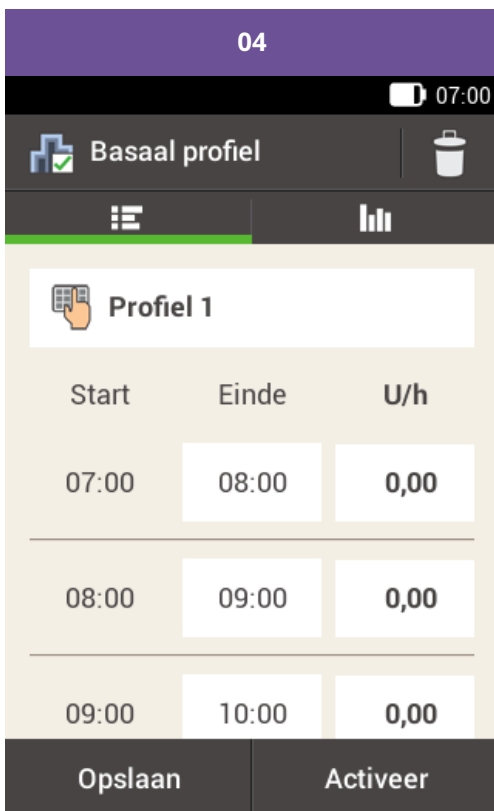

Tik op om het profiel een naam te geven.

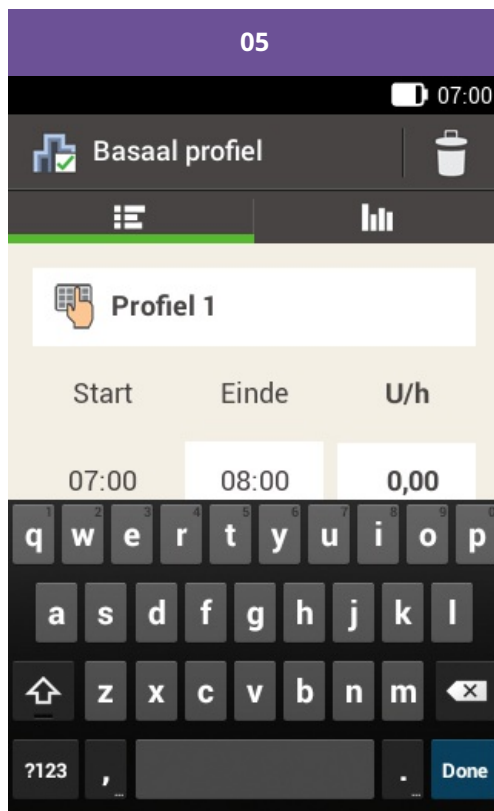

Voer de gewenste naam voor het basale profiel in (maximaal 12 karakters).

Tik vervolgens op [Gereed](#).

06

07:00

Basaal profiel

Profil 2

Start	Einde	U/h
07:00	08:00	0,00
08:00	09:00	0,00
09:00	10:00	0,00

Opslaan Activeer

Selecteer het eerste tijdsblok.

07

07:00

Eindtijd

08 : 30

OK

Voer de eindtijd voor het tijdsblok in.

Tik op Opslaan.


i Opmerking

U kunt alleen de eindtijd van de tijdsblokken van basale doseringen bewerken. De starttijd van ieder tijdsblok is identiek aan de eindtijd van het voorafgaande tijdsblok.

Om een tijdsblok te verwijderen, moet u de eindtijd van het tijdsblok instellen op de starttijd van hetzelfde tijdsblok.

Om een nieuw tijdsblok toe te voegen, stelt u de eindtijd van het laatste tijdsblok in op de gewenste starttijd voor het nieuwe tijdsblok.

De tijdsblokken van basale doseringen komen niet overeen met de tijdsblokken van bolusadviezen en worden hier ook niet voor gebruikt.

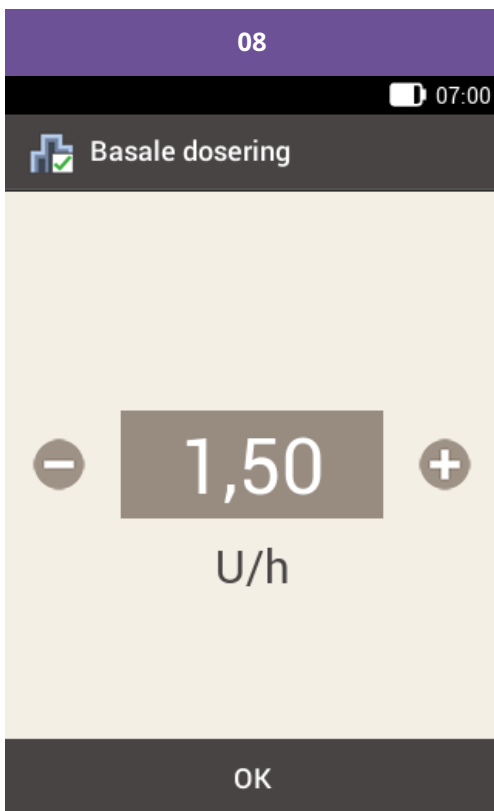


Voer de insulinehoeveelheid per uur in voor het tijdsblok.

Tik op [Opslaan](#).

Ga door met het invoeren van de eindtijden en basale doseringen voor een tijdsperiode van één uur tot u de juiste basale doseringen voor een tijdsperiode van één uur voor alle 24 uren van de dag heeft ingesteld.

Als u wilt opslaan maar dit basale profiel niet gelijk wilt activeren, ga dan door met stap 09.

Als u wilt opslaan en het nieuwe basale profiel direct wilt activeren, tik dan op "Activeren". Ga verder met stap 11.

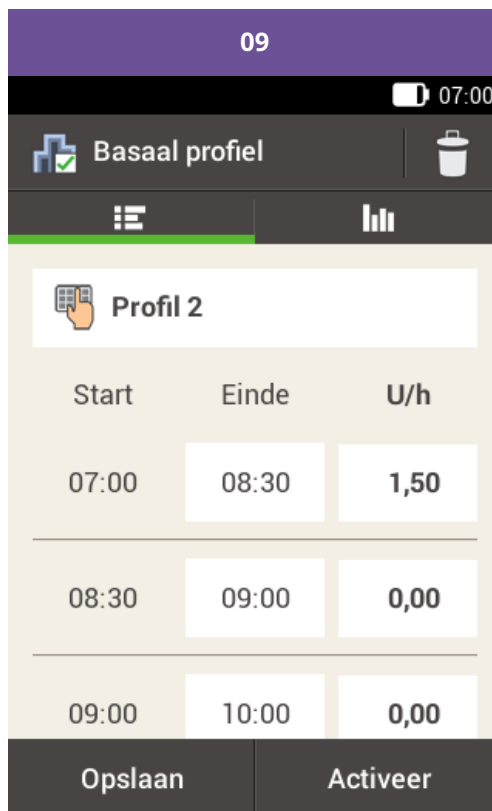

Tik op [Opslaan](#) om het ingestelde basale profiel op te slaan.



Basale profielen



Profiel 1

Totale hoeveelheid 12,0 U

Profiel 2

Totale hoeveelheid 16,0 U

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Het nieuw ingestelde basale profiel wordt in het overzicht van de beschikbare basale profielen weergegeven. Zorg ervoor dat de weergegeven totale hoeveelheid overeenstemt met de door uw zorgverlener aangegeven totale hoeveelheid basale insuline. Het basale profiel zal echter niet automatisch geactiveerd worden.

Zie de volgende sectie over hoe een basaal profiel geactiveerd moet worden.

Een basaal profiel activeren

Activeer het juiste profiel wanneer het aan de beurt is. Zo activeert u op vrijdagavond, als u overschakelt op uw weekendroutines, het profiel dat u voor de weekenden heeft geprogrammeerd.


The image displays two screenshots of a mobile application interface for diabetes management. The left screenshot shows the main status screen with a green header displaying a glucose reading of 5,9 mmol/L at 06:55 on 29 Mar 2018. Below this, a basal rate of 1,20 U/h is shown for 'Profiel 1'. A 'Nieuwe bolus' button with a plus sign is visible. The right screenshot shows the main menu with various icons for Bolus, Basale dos., Stop, Meten, Vervangen, Instellingen, Mijn gegevens, USB, Vliegtuigmod, Ak. signalen, and Help. At the bottom of both screenshots are navigation buttons: 'Hoofd-menu' and 'Gegevens toevoegen' on the left, and 'Status-scherm' and 'Gegevens toevoegen' on the right.


Tik in het statusscherm op het basale profiel.


Tik in het hoofdmenu op Basale dosering.

02

07:00

 Basale dosering

 Tijdelijke basale dosering

 Basale profielen

Tik op **Basale profielen**.

03

07:00

 Basale profielen 


 **Profiel 1**
Totale hoeveelheid 12,0 U

 **Profiel 2**
Totale hoeveelheid 16,0 U


Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Het actueel actieve basale profiel herkent u aan .


Tik op het basale profiel dat u wilt activeren.

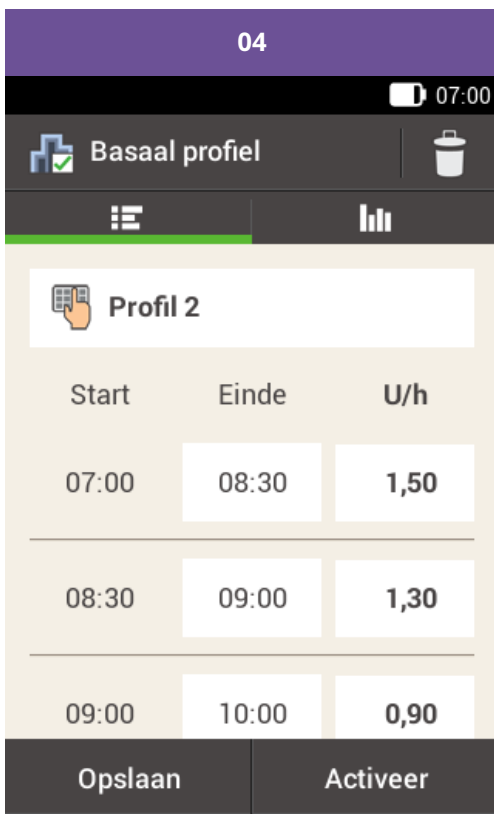


Scroll het scherm eventueel naar boven om alle tijdsblokken van het basale profiel te zien.


Tik op  als u de grafiek voor het profiel wilt zien.

Tik op [Activeren](#).

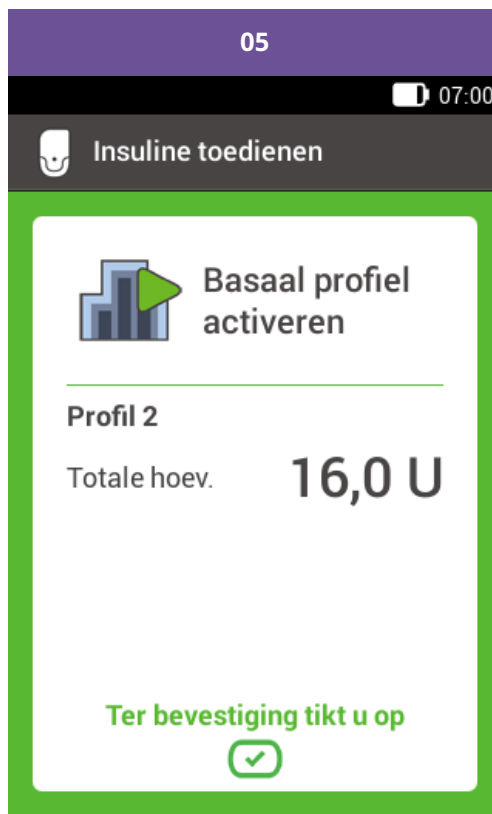

Druk om te bevestigen op de insulinetoets .

06

 07:00

5,9 mmol/L

06:55, 08 mrt. 2017



150 U

Profiel 1

1,50 U/h

Nieuwe bolus



Hoofd-
menu



Gegevens
toevoegen

Het geactiveerde basale profiel wordt
op het statusscherm weergegeven.

Een basaal profiel wijzigen

01


Basale profielen

Profiel 1
Totale hoeveelheid 12,0 U

Profiel 2
Totale hoeveelheid 16,0 U

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Tik op het basale profiel dat u wilt wijzigen (bijv. Profiel 2).

Het actueel actieve basale profiel herkent u aan .

02

Basaal profiel

Profil 2

Start	Einde	U/h
07:00	08:30	1,50
08:30	09:00	1,30
09:00	10:00	0,90

Opslaan Activeer

Tik op een eindtijd om de eindtijd voor het tijdsblok te wijzigen.

Tik op een basale dosering om de basale dosering voor het tijdsblok te wijzigen.

Herhaal deze procedure tot voor de volledige 24 uur van de dag de correcte basale dosering ingesteld is.

Tik op Opslaan.

Opmerking

Scroll het scherm eventueel naar boven om alle tijdsblokken van het basale profiel te kunnen controleren.



Basale profielen



Profiel 1

Totale hoeveelheid 12,0 U

Profiel 2


Totale hoeveelheid 16,0 U

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Het gewijzigde basale profiel wordt in het overzicht van de beschikbare basale profielen weergegeven.

Controleer of de weergegeven totale hoeveelheid overeenstemt met de door uw zorgverlener aangegeven totale hoeveelheid.

Een basaal profiel verwijderen

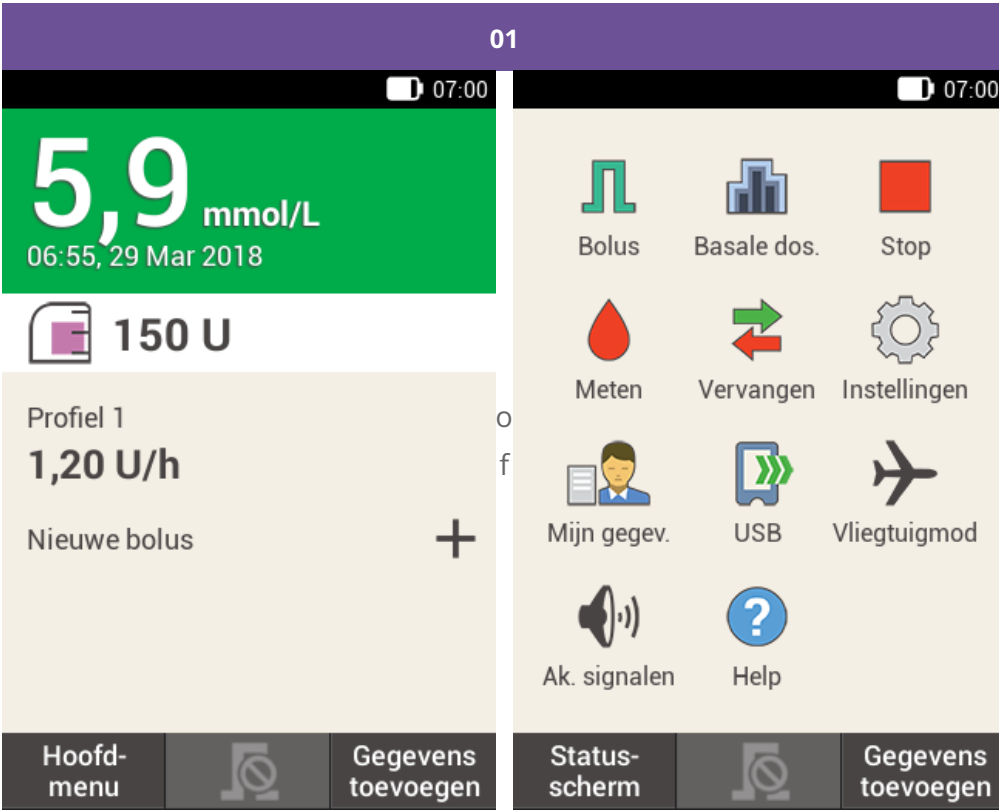

The image displays two screenshots of a mobile application interface for diabetes management. The left screenshot shows the main status screen with a green header displaying a glucose reading of 5,9 mmol/L and the time 06:55, 29 Mar 2018. Below this, there is a section for 'Profiel 1' with a basal rate of 1,20 U/h and a 'Nieuwe bolus' button. The right screenshot shows the main menu with various options: Bolus, Basale dos., Stop, Meten, Vervangen, Instellingen, Mijn gegev., USB, Vliegtuigmod, Ak. signalen, and Help. At the bottom of both screenshots, there are navigation buttons: 'Hoofd-menu' and 'Gegevens toevoegen' on the left, and 'Status-scherm' and 'Gegevens toevoegen' on the right.

Tik in het statusscherm op het basale profiel.

Tik in het hoofdmenu op [Basale dosering](#).

02

07:00

Basale dosering

Tijdelijke basale dosering

Basale profielen

Tik op Basale profielen.

03

07:00

Basale profielen


Profiel 1
Totale hoeveelheid 10,0 U


Profiel 2
Totale hoeveelheid 14,0 U

Profiel 3
Totale hoeveelheid 18,0 U

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Tik op het basale profiel dat u wilt verwijderen (bijv. basaal profiel 3).

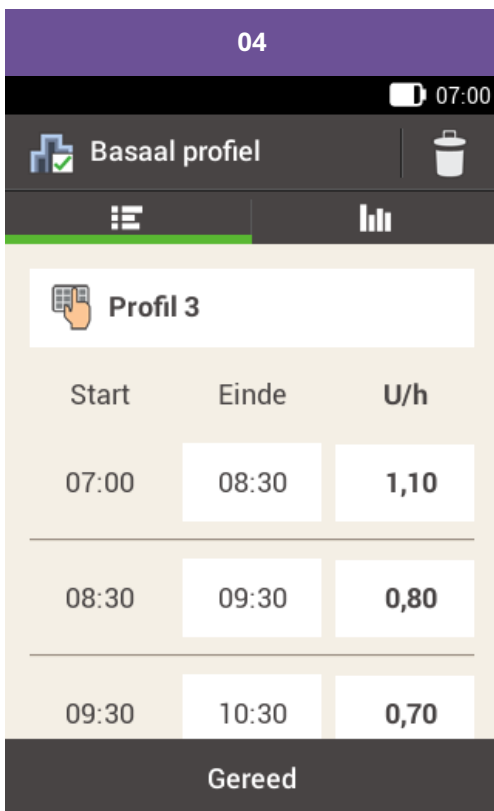

Tik op  in de rechter bovenhoek van het scherm.



Als het actieve basale profiel verwijderd moet worden, wordt de volgende display weergegeven.

Tik op Ja.



Basale profielen



Profiel 1

Totale hoeveelheid 10,0 U

Profiel 2

Totale hoeveelheid 14,0 U

Als u een nieuw basaal profiel toe wilt voegen, moet u op "+" tikken.

Het geselecteerde basale profiel is uit de lijst verwijderd.

Toegelaten/ingeschreven/geregistreerd onder de productnaam:
Accu-Chek Solo-micropompsysteem

ACCU-CHEK, ACCU-CHEK AVIVA, ACCU-CHEK AVIVA SOLO, ACCU-CHEK
SMART PIX, ACCU-CHEK SOLO en FASTCLIX zijn merken van Roche.

De merknaam en logo's Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken
van Bluetooth SIG, Inc. en voor het gebruik van deze merken door Roche is
een licentie verkregen.

Alle overige productnamen en handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars.

© 2021 Roche Diabetes Care

www.accu-chek.nl
0800 - 022 05 85
Roche Diabetes Care Nederland BV
Postbus 1450
1300 BL Almere

