

كتيب التدريب

أكيو-تشيك® سولو نظام المضخة الصغيرة



شاشة لإدخال جرعة الإنسولين

التعرف على شاشة إدخال جرعة الإنسولين



الوصف	الاسم	
إذا لم تتوفر أي نتيجة قياس حالية، يتم عرض ---.	نتيجة قياس سكر الدم	①
إذا لم تتوفر أي إنسولين نشط، يتم عرض ---. يتوفر عنصر الشاشة هذا فقط مع وظيفة استشارة جرعة الإنسولين المنشطة.	الإنسولين النشط	②
إذا لم يتم إدخال أي كمية كربوهيدرات، يتم عرض ---.	كمية الكربوهيدرات	③
انقر على خانة الإدخال هذه لإدخال الكمية الإجمالية لجرعة الإنسولين. الكمية الإجمالية هي المجموع من جرعة الإنسولين التصحيحية وجرعة الإنسولين الخاصة بالوجبة.	الكمية الإجمالية	④
انقر على خانة الإدخال هذه لإدخال كمية الإنسولين اللازمة للعودة من نسبة سكر في الدم خارج المدى إلى نسب ضمن المدى. قد يكون الإنسولين التصحيحي سلبيًا، إذا كانت نسبة السكر في الدم أقل من القيمة المستهدفة. سيتم إبعاد ذلك عن جرعة الإنسولين المعلقة الخاصة بالوجبة.	الإنسولين التصحيحي	⑤
انقر على خانة الإدخال هذه لإدخال كمية الإنسولين اللازمة لتعويض الطعام الذي تم تناوله.	إنسولين الوجبة	⑥
انقر على هذا العنصر لاختيار أحد أنواع جرعات الإنسولين التالية: جرعة الإنسولين قياسية، جرعة الإنسولين ممتدة، جرعة الإنسولين متعددة الموجات، جرعة الإنسولين سريعة، جرعة الإنسولين قلم/حقنة.	نوع جرعة الإنسولين	⑦

تكون المعلومات المعروضة على جهاز إدارة السكري لكمية الكربوهيدرات (③)، مرئية فقط إذا أدخلتها في شاشة نتيجة قياس سكر الدم المفصلة.

ملاحظة

إذا ظهرت شاشة إدخال جرعة الإنسولين للمرة الأولى، فهذا يعني أنه لم يتم تحديد أي كميات لجرعة الإنسولين. يجب أن تقوم أنت بإدخال كمية جرعة الإنسولين.

إذا قمت أولاً بضبط جرعة الإنسولين التصحيحية أو جرعة الإنسولين الخاصة بالوجبة تصحيح الكمية الإجمالية للجرعة غير نشطة ولا يمكن تعديلها. ولكن يتم تحديث القيمة وفقاً لذلك.

إذا قمت أولاً بضبط الكمية الإجمالية، سيتم ضبط الإنسولين بالكامل كجرعة الإنسولين تصحيحية. خانات إدخال جرعة الإنسولين التصحيحية وجرعة الإنسولين الخاصة بالوجبة غير نشطة.

لذلك، يوصى بالبدء بإدخال جرعة الإنسولين التصحيحية وجرعة الإنسولين الخاصة بالوجبة بشكل منفصل. بدون إعداد استشارة جرعة الإنسولين، فإن التمييز بين الإنسولين التصحيحي وإنسولين الوجبة يؤثر بشكل رئيسي على أنواع الجرعات التي يمكنك استخدامها. قد يساعد إعداد استشارة جرعة الإنسولين في التحكم بشكل أفضل في نسب السكر في الدم المرتفعة بعد الوجبات.

جرعة الإنسولين القياسية

ما هي جرعة الإنسولين القياسية


مع جرعة الإنسولين القياسية يتم إعطاء جرعة الإنسولين المبرمجة دفعة واحدة، تشبه الحقن. قد تكون جرعة الإنسولين هذه مفيدة مع المواد الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات سريعة المفعول، مثل الكعك أو الخبز. جرعة الإنسولين القياسية هي أيضًا الجرعة المناسبة لتصحيح مستويات السكر في الدم المرتفعة.

بدء جرعة الإنسولين

01	01	01
<p>نسبة القياس بالتفصيل</p> <p>162 مج/دل 06:55, 2018/03/29</p> <p>زمن القياس</p> <p>الكربوهيدرات</p> <p>أحداث الصحة</p> <p>ملحوظة</p>	<p>بدء المعدل جرعة</p> <p>إعدادات استبدال القياس</p> <p>الطيران و USB</p> <p>بياناتي</p> <p>المساعدة الإشارات</p>	<p>162 مج/دل 2018/03/29, 06:55</p> <p>200 و</p> <p>إطار 1 1.20 و/س جرعة جديدة</p>
تم جرعة الأنسولين	إضافة البيانات بيان الحالة	إضافة البيانات القائمة الرئيسية
<p>نتيجة القياس < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 3:</p> <p>بعد قياس سكر الدم لديك: انقر على جرعة الإنسولين على شاشة نسبة القياس بالتفصيل. واصل بالانتقال إلى الخطوة 3.</p>	<p>القائمة الرئيسية < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 2:</p> <p>انقر على قائمة جرعة الإنسولين من داخل القائمة الرئيسية. واصل بالانتقال إلى الخطوة 2.</p>	<p>بيان الحالة < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 1:</p> <p>انقر على جرعة جديدة أو + على بيان الحالة. واصل بالانتقال إلى الخطوة 2.</p>

ملاحظة

إذا كنت قد قمت بإعداد وظيفة استشارة جرعة الإنسولين بالفعل، فإن النقر على "جرعة الإنسولين"، في الخيار 3، سيوجهك مباشرة إلى شاشة نتيجة استشارة جرعة الإنسولين. (لمزيد من المعلومات حول استشارة جرعة الإنسولين، انظر).

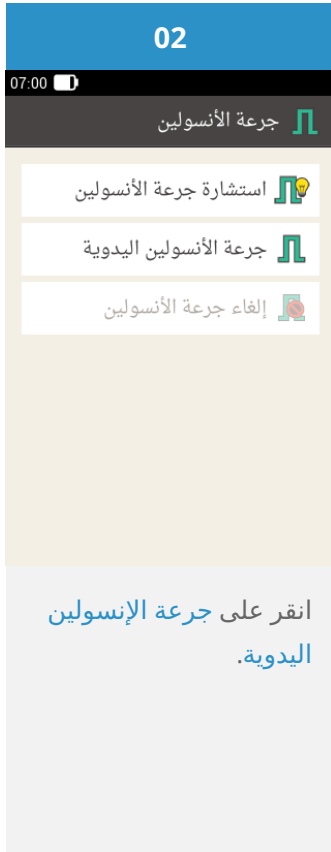

إدخال جرعة الإنسولين

03	04	05
<p>07:00 </p> <p>إدخال جرعة الأنسولين </p> <p>0.00 و --- مج/دل </p> <p>0.00 و الكربوهيدرات </p> <p>0.00 و الكمية الإجمالية</p> <p>النوع قياسي</p> <p>الأحداث الصحية المتضمنة: 0 %</p>	<p>07:00 </p> <p>نسبة الأنسولين التصحيحي </p> <p>+ 1.40 -</p> <p>و</p>	<p>07:00 </p> <p>نسبة الأنسولين الخاصة بالوجبة </p> <p>+ 5.00 -</p> <p>و</p>
<p>جرعة الأنسولين</p>	<p>موافق</p>	<p>موافق</p>
<p>انقر على خانة الإدخال المناسبة لحالتك: أدخل جرعة الإنسولين التصحيحية، أو جرعة الإنسولين الخاصة بالوجبة، أو الكمية الإجمالية للجرعة.</p>	<p>استخدم و لتعديل الكمية المرغوب فيها لجرعة الأنسولين التصحيحية.</p> <p>انقر على موافق.</p>	<p>استخدم و لتعديل الكمية المرغوب فيها لجرعة الأنسولين الخاصة بالوجبة. انقر على موافق.</p>

06	07	08
<p>07:00 </p> <p>إدخال جرعة الأنسولين </p> <p>0.00 و --- مج/دل --- و </p> <p>6.40 و الكربوهيدرات --- جم </p> <p>6.40 و الكمية الإجمالية</p> <p>النوع قياسي</p> <p>جرعة الأنسولين</p>	<p>07:00 </p> <p>إعطاء الأنسولين </p> <p>إعطاء الجرعة القياسية </p> <p>الكمية الإجمالية 6.40 و</p> <p>للتأكيد اضغط على </p>	<p>07:00 </p> <p>162 مج/دل 2018/03/29, 06:55</p> <p>195 و </p> <p>إطار 1 1.20 و/س جرعة الأنسولين القياسية 1.60 و</p> <p>+ جرعة جديدة</p> <p>إضافة القائمة البيانات الرئيسية </p>
<p>انقر على جرعة الإنسولين.</p>	<p>تعرض عليك هذه الشاشة تفاصيل جرعة الإنسولين. تحقق من أنها صحيحة ثم اضغط على زر إعطاء الإنسولين لإعطاء جرعة الإنسولين.</p>	<p>تقوم المصنعة الصغيرة بإعطاء جرعة الإنسولين القياسية. تعرض الشاشة بيان الحالة مع شريط تقدم يوضح تقدم إعطاء جرعة الإنسولين.</p>

جرعة الإنسولين الممتدة

ما هي جرعة الإنسولين الممتدة

يمكنك استخدام جرعة الإنسولين الممتدة في المواقف التي تتطلب إعطاء جرعة الإنسولين على مدى فترة زمنية بدلاً من إعطائها دفعة واحدة. جرعة الإنسولين الممتدة هي وظيفة خاصة بمضخات تسريب الإنسولين حيث يتم إعطاء الكمية على مدى فترة زمنية يمكنك تعديلها، حسبما يلزم. وقد تكون مفيدة بصفة خاصة مع الوجبات بطيئة الهضم، مثل المواد الغذائية التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة أو محتوى عالٍ من الدهون والبروتين. أيضًا مع الوجبات التي يمتد تناولها لفترة أطول (مثل البوفيه)، قد تكون جرعة الإنسولين الممتدة مفيدة. يمكن برمجة مدة إعطاء جرعة الإنسولين على فترات تبلغ كلُّ منها 15 دقيقة لفترة تصل إلى 24 ساعة. يبدأ الإعطاء مباشرةً بعد تأكيد جرعة الإنسولين. يتم أثناء إعطاء جرعة الإنسولين بالكامل عرض الوقت المتبقي وكمية جرعة الإنسولين الممتدة في بيان الحالة. يمكنك أثناء جرعة الإنسولين الممتدة الجارية بالفعل إضافة جرعة الإنسولين قياسية أو سريعة بالإضافة إلى جرعة الإنسولين ممتدة أخرى أو جرعة الإنسولين متعددة الموجات.

ملاحظة

يمكنك فقط برمجة جرعة الإنسولين ممتدة عند قيامك ببرمجة الإنسولين للكربوهيدرات وعدم إعطاء إنسولين للجرعات التصحيحية. لذلك لا تقم ببرمجة جرعة الإنسولين الكلية.

01		
<p>نسبة القياس بالتفصيل</p> <p>162 مج/دل 06:55, 2018/03/29</p> <p>زمن القياس</p> <p>الكربوهيدرات</p> <p>أحداث الصحة</p> <p>ملحوظة</p> <p>جرعة الأنسولين</p>	<p>بدء</p> <p>المعدل</p> <p>جرعة</p> <p>إعدادات</p> <p>استبدال</p> <p>القياس</p> <p>و الطيران</p> <p>USB</p> <p>بياناتي</p> <p>المساعدة</p> <p>الإشارات</p> <p>إضافة البيانات</p> <p>بيان الحالة</p>	<p>162 مج/دل 2018/03/29, 06:55</p> <p>200 و</p> <p>إطار 1</p> <p>1.20 و/س</p> <p>جرعة جديدة</p> <p>إضافة البيانات</p> <p>القائمة الرئيسية</p>
<p>نتيجة القياس < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 3:</p> <p>بعد قياس سكر الدم لديك: انقر على جرعة الإنسولين على شاشة نسبة القياس بالتفصيل. واصل بالانتقال إلى الخطوة 3.</p>	<p>القائمة الرئيسية < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 2:</p> <p>انقر على قائمة جرعة الإنسولين من داخل القائمة الرئيسية. واصل بالانتقال إلى الخطوة 2.</p>	<p>بيان الحالة < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 1:</p> <p>انقر على جرعة جديدة أو + على بيان الحالة. واصل بالانتقال إلى الخطوة 2.</p>

ملاحظة

إذا كنت قد قمت بإعداد وظيفة استشارة جرعة الإنسولين بالفعل، فإن النقر على "جرعة الإنسولين"، في الخيار 3، سيوجهك مباشرة إلى شاشة نتيجة استشارة جرعة الإنسولين. (لمزيد من المعلومات حول استشارة جرعة الإنسولين، انظر).

02	03
07:00	07:00
جرعة الأنسولين	إدخال جرعة الأنسولين
<p>استشارة جرعة الأنسولين </p> <p>جرعة الأنسولين اليدوية </p> <p>إلغاء جرعة الأنسولين </p>	<p>0.00 و --- مج/دل </p> <p>0.00 و --- الكربوهيدرات جم </p> <p>الكمية الإجمالية 0.00 و</p> <p>النوع قياسي</p> <p>الأحداث الصحية المتضمنة: 0 %</p> <p>جرعة الأنسولين</p>
انقر على جرعة الإنسولين اليدوية.	انقر على خانة الإدخال المناسبة لحالتك: أدخل جرعة الإنسولين الخاصة بالوجبة.

ملاحظة

لا يمكنك إعطاء الإنسولين التصحيحي على مدى فترة زمنية. لذلك، لا تقم بإدخال الإنسولين في خانة الإنسولين التصحيحي أو الإجمالي. إذا كنت بحاجة إلى جرعة الإنسولين تصحيحي، فاستخدم بدلاً منها جرعة الإنسولين قياسية أو جرعة الإنسولين متعددة الموجات.

04	05	06
07:00	07:00	07:00
نسبة الأنسولين الخاصة بالوجبة	إدخال جرعة الأنسولين	نوع جرعة الأنسولين
<div style="text-align: center;"> + 5.00 - و </div>	<div style="text-align: center;"> --- مج/دل و --- الكربوهيدرات جم --- <hr/> 6.40 الكمية الإجمالية النوع قياسي </div>	<div style="text-align: center;"> <input type="radio"/> جرعة الأنسولين القياسية <input checked="" type="radio"/> جرعة الأنسولين الممتدة <input type="radio"/> جرعة الأنسولين متعددة الموجات <input type="radio"/> جرعة الأنسولين السريعة <input type="radio"/> قلم/حقنة </div>
موافق	جرعة الأنسولين	موافق
<p>استخدم + و - لضبط الكمية المرغوب فيها لجرعة الأنسولين الخاصة بالوجبة. انقر على موافق.</p>	<p>انقر على النوع.</p>	<p>انقر على جرعة الإنسولين الممتدة. قم بعد ذلك بالنقر على موافق.</p>

07	08	09
07:00	07:00	07:00
جرعة الأنسولين الممتدة	المدة	جرعة الأنسولين الممتدة
<div style="text-align: center;"> الكمية الإجمالية 6.40 و المدة 0 س 00 د </div>	<div style="text-align: center;"> 02 ساعات + - 15 دقائق </div>	<div style="text-align: center;"> الكمية الإجمالية 6.40 و المدة 2 س 15 د </div>
جرعة الأنسولين	موافق	جرعة الأنسولين
<p>انقر على المدة.</p>	<p>استخدم + و - لضبط الساعات والدقائق لفترة جرعة الأنسولين الممتدة. انقر على موافق.</p>	<p>انقر على جرعة الإنسولين.</p>

10	11
<p>07:00 </p> <p>إعطاء الأنسولين </p> <p>إعطاء جرعة الأنسولين الممتدة </p> <p>الكمية الإجمالية 6.40 و المدة 2 س 15 د</p> <p>للتأكيد اضغط على </p>	<p>07:00 </p> <p>162 مج/دل 2018/03/29, 06:55</p> <p>195 و </p> <p>إطار 1 1.20 و/س جرعة الأنسولين الممتدة 2 س 15 د 6.40 و</p> <p>جرعة جديدة +</p> <p>إضافة البيانات </p> <p>القائمة الرئيسية</p>
<p>تعرض عليك هذه الشاشة تفاصيل جرعة الإنسولين. تحقق من أنها صحيحة ثم اضغط على زر إعطاء الإنسولين لإعطاء جرعة الإنسولين.</p>	<p>تقوم المصخة الصغيرة بإعطاء جرعة الإنسولين الممتدة. تعرض الشاشة بيان الحالة مع شريط تقدم يوضح تقدم إعطاء جرعة الإنسولين والوقت المتبقي حتى الانتهاء.</p>












جرعة الإنسولين متعددة الموجات

ما هي جرعة الإنسولين متعددة الموجات؟

جرعة الإنسولين متعددة الموجات هي وظيفة أخرى فريدة لمضخات الإنسولين وتجمع بين جرعة الإنسولين قياسية وجرعة الإنسولين ممتدة: يتم إعطاء جزء من كمية جرعة الإنسولين على الفور، بينما يتم إعطاء الجزء الآخر على مدار فترة زمنية محددة. هذا النوع من جرعات الإنسولين قد يكون مفيدًا عند تناول وجبات تحتوي على الكربوهيدرات سريعة وبطيئة الهضم وكذلك البروتينات والدهون أو الوجبات الطويلة ذات الحصى المتعددة. يمكنك أيضًا استخدام هذا النوع من جرعات الإنسولين عندما تخطط لتناول الكربوهيدرات بطيئة الهضم، لكن تعاني من مستوى سكر في الدم مرتفع قبل الوجبة. يمكنك بعد ذلك برمجة الجزء الفوري من جرعة الإنسولين لتصحيح مستوى السكر في الدم وبرمجة النسبة الممتدة للكربوهيدرات. يمكن برمجة مدة إعطاء جرعة الإنسولين الممتدة على فترات تبلغ كلُّ منها 15 دقيقة لفترة تصل إلى 24 ساعة، وتبدأ على الفور بعد قيامك بتأكيد جرعة الإنسولين. يمكنك أثناء جرعة الإنسولين متعددة الموجات الجارية بالفعل إضافة جرعة الإنسولين قياسية أو سريعة بالإضافة إلى جرعة الإنسولين ممتدة أخرى أو جرعة الإنسولين متعددة الموجات.

01		
<p>07:00</p> <p>نسبة القياس بالتفصيل</p> <p>162 مج/دل</p> <p>06:55, 2018/03/29</p> <p>زمن القياس</p> <p>الكربوهيدرات</p> <p>أحداث الصحة</p> <p>ملحوظة</p>	<p>07:00</p> <p>بدء المعدل جرعة</p> <p>إعدادات استبدال القياس</p> <p>الطيران USB بياناتي</p> <p>المساعدة الإشارات</p>	<p>07:00</p> <p>162 مج/دل</p> <p>2018/03/29, 06:55</p> <p>200 و</p> <p>إطار 1</p> <p>1.20 و/س</p> <p>جرعة جديدة</p>
تم جرعة الأنسولين	إضافة البيانات بيان الحالة	إضافة البيانات القائمة الرئيسية
<p>نتيجة القياس < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 3:</p> <p>بعد قياس سكر الدم لديك: انقر على جرعة الإنسولين على شاشة نسبة القياس بالتفصيل. واصل بالانتقال إلى الخطوة 3.</p>	<p>القائمة الرئيسية < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 2:</p> <p>انقر على قائمة جرعة الإنسولين من داخل القائمة الرئيسية. واصل بالانتقال إلى الخطوة 2.</p>	<p>بيان الحالة < جرعة الإنسولين</p> <p>الخيار 1:</p> <p>انقر على جرعة جديدة أو + على بيان الحالة. واصل بالانتقال إلى الخطوة 2.</p>

إذا كنت قد قمت بإعداد وظيفة استشارة جرعة الإنسولين بالفعل، فإن النقر على "جرعة الإنسولين"، في الخيار 3، سيوجهك مباشرة إلى شاشة نتيجة استشارة جرعة الإنسولين. (لمزيد من المعلومات حول استشارة جرعة الإنسولين، انظر).

02	ملاحظة 	03
<p>07:00 </p> <p>جرعة الأنسولين </p> <p>استشارة جرعة الأنسولين </p> <p>جرعة الأنسولين اليدوية </p> <p>إلغاء جرعة الأنسولين </p>	<p>يمكنك فقط برمجة جرعة الإنسولين متعددة الموجات إذا كانت جرعة الإنسولين تحتوي على إنسولين الوجبة. لذلك، لا تقم ببرمجة جرعة الإنسولين الكلية.</p>	<p>07:00 </p> <p>إدخال جرعة الأنسولين </p> <p>--- مج/دل و 0.00] و --- </p> <p>الكربوهيدرات و 0.00 جم --- </p> <p>الكمية الإجمالية 0.00 و</p> <p>النوع  قياسي</p> <p>الأحداث الصحية المتضمنة: 0 %</p> <p>جرعة الأنسولين</p> <p>انقر على خانة الإدخال المناسبة لحالتك: أدخل جرعة الإنسولين التصحيحية أو جرعة الإنسولين الخاصة بالوجبة.</p>
<p>انقر على جرعة الإنسولين اليدوية.</p>		

04	05	06
<p>07:00 </p> <p>نسبة الأنسولين الخاصة بالوجبة </p> <p>5.00</p> <p>و</p> <p>موافق</p>	<p>07:00 </p> <p>نسبة الأنسولين التصحيحي </p> <p>1.40</p> <p>و</p> <p>موافق</p>	<p>07:00 </p> <p>إدخال جرعة الأنسولين </p> <p>0.00 و --- مج/دل </p> <p>و --- </p> <p>6.40 و الكربوهيدرات </p> <p>جم --- </p> <p>6.40 و الكمية الإجمالية</p> <p>النوع قياسي</p> <p>جرعة الأنسولين</p>
<p>استخدم + و - لضبط الكمية المرغوب فيها لجرعة الإنسولين الخاصة بالوجبة.</p> <p>انقر على موافق.</p>	<p>استخدم و لتعديل الكمية المرغوب فيها لجرعة الأنسولين التصحيحية.</p> <p>انقر على موافق.</p>	<p>انقر على النوع.</p>

07	08	09
<p>07:00 </p> <p>نوع جرعة الأنسولين </p> <p>جرعة الأنسولين القياسية <input type="radio"/></p> <p>جرعة الأنسولين الممتدة <input type="radio"/></p> <p>جرعة الأنسولين متعددة المرات <input checked="" type="radio"/></p> <p>جرعة الأنسولين السريعة <input type="radio"/></p> <p>قلم/حقنة <input type="radio"/></p> <p>موافق</p>	<p>07:00 </p> <p>جرعة الأنسولين متعددة المرات </p> <p>الكمية الإجمالية 6.40 و</p> <p>جرعة الأنسولين الفورية 1.40 و</p> <p>كمية ممتدة 5.00 و</p> <p>المدة 2 س 00 د</p> <p>جرعة الأنسولين</p>	<p>07:00 </p> <p>جرعة الأنسولين الفورية </p> <p>3.00</p> <p>و</p> <p>موافق</p>
<p>انقر على جرعة الإنسولين متعددة المرات.</p> <p>قم بعد ذلك بالنقر على موافق.</p>	<p>انقر على جرعة الإنسولين الفورية أو الكمية الممتدة.</p>	<p>استخدم + و - لضبط مدة الكمية الممتدة.</p> <p>انقر على موافق.</p>

نظرًا لأن الكمية الإجمالية ستظل كما هي، لا يهم ما إذا قمت بضبط الكمية الممتدة أو جرعة الإنسولين الفورية، حيث سيتم حساب الأخيرة وفقًا لذلك. لا يمكنك ضبط جرعة الإنسولين فورية أقل من الإنسولين التصحيحي.

10	11	12
07:00	07:00	07:00
جرعة الأنسولين متعددة الموجات	المدة	جرعة الأنسولين متعددة الموجات
الكمية الإجمالية 6.40 و	01	الكمية الإجمالية 6.40 و
جرعة الأنسولين الفورية 3.00 و	ساعات	جرعة الأنسولين الفورية 3.00 و
كمية ممتدة 3.40 و	+ -	كمية ممتدة 3.40 و
المدة 2 س 00 د	45	المدة 1 س 45 د
	دقائق	
جرعة الأنسولين	موافق	جرعة الأنسولين
انقر على المدة.	استخدم و لضبط مدة الجزء الممتد من جرعة الأنسولين متعددة الموجات. انقر على موافق.	انقر على جرعة الأنسولين.

13	14
<p>07:00 </p> <p>إعطاء الأنسولين </p> <p>إعطاء جرعة الأنسولين متعددة الموجات </p> <p>الكمية الإجمالية 6.40 و على الفور 3.00 و ممتد 3.40 و المدة 1 س 45 د</p> <p>للتأكيد اضغط على </p>	<p>07:00 </p> <p>162 مج/دل 2018/03/29, 06:55</p> <p>192 و </p> <p>إطار 1 0.70 و/س جرعة الأنسولين م الموجات 4.00 و 1 س 30 د</p> <p>+ جرعة جديدة</p> <p>إضافة البيانات القائمة الرئيسية</p>
<p>تعرض عليك هذه الشاشة تفاصيل جرعة الإنسولين. تحقق من أنها صحيحة ثم اضغط على زر إعطاء الإنسولين لإعطاء جرعة الإنسولين.</p>	<p>تقوم المصخة الصغيرة بإعطاء جرعة الإنسولين متعددة الموجات. تعرض الشاشة بيان الحالة مع شريط تقدم يوضح تقدم إعطاء جرعة الإنسولين والوقت المتبقي حتى الانتهاء.</p>

جرعة الإنسولين السريعة

ما هي جرعة الإنسولين السريعة



جرعة الإنسولين السريعة



جرعة الإنسولين

التي تم برمجتها باستخدام الأزرار على المضخة الصغيرة

لماذا ومتى تحتاجها



مستوى السكر
في الدم مر
تفع



الكربوهيدرات
سريعة الهضم



تم تنشيط وضعية
الطيران على جهازك

أو



غير متاح أو
يتعذر التواصل

الرجاء ملاحظة

إذا لزم الأمر قم بتغيير جرعة
الأنسولين السريعة إلى

0.5 وحدة

1.0 وحدة

2.0 وحدة




0.2 وحدة


الإعداد الأساسي لزيادة
جرعة الأنسولين السريعة

ما يجب عليك فعله

1

للتشيط
اضغط 3 ثوان حتى
سماع نغمة تنبيه

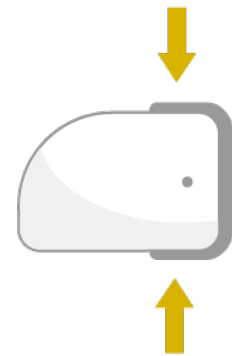

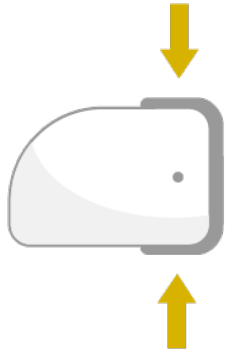

للحصول على جرعة



اضغط على كل من زري
جرعة الأنسولين السريعة معًا
ضغطة واحدة = كمية واحدة
من زيادة جرعة الأنسولين

2

3

تأكيد نغمة

تنبيه واحدة = كمية
واحدة من زيادة جرعة
الأنسولين

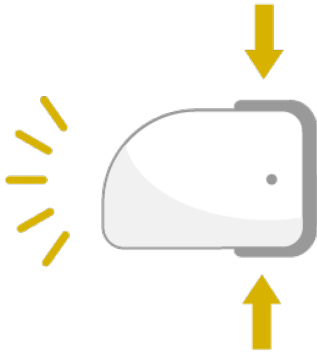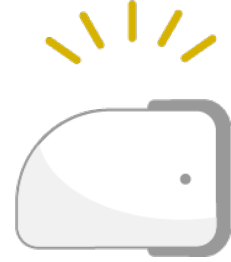

، للموافقة

اضغط على كل من زري
جرعة الأنسولين السريعة مرة
أخرى حتى سماع نغمة تنبيه

4

✓ بدء إعطاء جرعة الأنسولين السريعة


تحذير ⚠

تأكد من أنك تعرف خطوة زيادة جرعة الأنسولين السريعة والصحيحة وتستخدمها أيضًا لاحتياجك الشخصي من الأنسولين. إن استخدام زيادة جرعة الأنسولين الخاطئة يعطي جرعة الأنسولين خاطئة.

ملاحظة

إذا استخدمت جرعة الإنسولين السريعة لتغطية الكربوهيدرات، ينبغي عليك فيما بعد ضبط كمية الوجبة في المذكرة للحصول على أفضل استشارة جرعة الإنسولين. انظر للحصول على مزيد من المعلومات.

استخدام جرعة الإنسولين السريعة

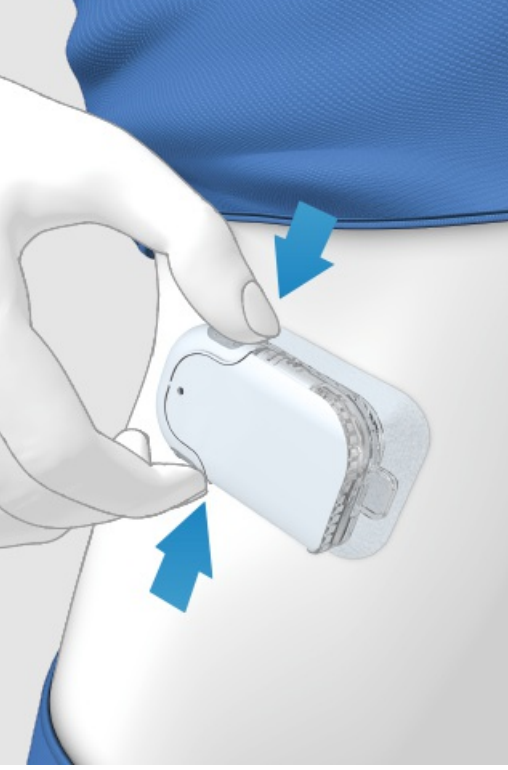

- 1 واصل الضغط على زرّ جرعة الإنسولين السريعة لمدة 3 ثوانٍ حتى تسمع نغمة.
- 2 بعد سماع النغمة، اضغط على زر جرعة الإنسولين السريعة معًا - مرة واحدة لكل زيادة، حتى الوصول إلى جرعة الإنسولين المرغوبة.
- 3 بعد 3 ثوانٍ من آخر ضغطة على الزر، ستقوم المضخة الصغيرة حينها بتأكيد عدد الضغوطات على الزر مع سماع نغمة واحدة لكل ضغطة لتأكيد كمية الإنسولين التي تم إدخالها.
- 4 إذا كنت توافق على كمية الإنسولين: اضغط على كلا زرّي جرعة الإنسولين السريعة مرة أخرى لإعطاء جرعة الإنسولين السريعة. ستؤكد المضخة بداية إعطاء جرعة الإنسولين مع إصدار صوت.

ملاحظة ⓘ

إذا لم تقم بتأكيد جرعة الإنسولين السريعة بالضغط على كلا الزرين في غضون 5 ثوانٍ، سيتم إلغاء جرعة الإنسولين السريعة المبرمجة وإصدار صوت وفقًا لذلك.

إلغاء جرعة الإنسولين

إلغاء جرعة باستخدام قائمة "إلغاء جرعة الإنسولين"
لديك خياران لإلغاء جرعة الإنسولين باستخدام جهاز إدارة السكري:

قبالة بيان الحالة أو القائمة الرئيسية، يمكنك إلغاء جرعة بالنقر على .

في قائمة إلغاء جرعة الإنسولين، يمكنك إلغاء جرعة واحدة أو كل الجرعات.

إلغاء جرعة الإنسولين أثناء البرمجة

الجرعة القياسية والممتدة ومتعددة الموجات

أثناء البرمجة، اضغط على  للعودة إلى آخر خطوة وإدخال قيمة جديدة.

جرعة الإنسولين السريعة

إذا لم تقم بتأكيد جرعة الإنسولين السريعة بالضغط على كلا زرین جرعة الإنسولين السريعة في غضون 5 ثوانٍ، سيتم إلغاء جرعة الإنسولين السريعة المبرمجة.

منع إعطاء جرعة الإنسولين بدون جهاز إدارة السكري

إذا لم يكن جهاز إدارة السكري في متناول يديك وكنت تريد إيقاف إعطاء جرعة الإنسولين، قم بإزالة المضخة الصغيرة من حامل المضخة طالما أنه يجري إعطاء الجرعة. ثم أعد تثبيت المضخة في حامل المضخة.

<p>01</p> <p>07:00</p> <p>162 مج/دل 2018/03/29 ,06:55</p> <p>192 و</p> <p>إطار 1 0.70 و/مس جرعة الأنسولين م الموجات 1 س 10 د 3.50 و</p> <p>جرعة الأنسولين الممتدة 30 د 2.00 و</p> <p>إضافة البيانات القائمة الرئيسية</p>	<p>02</p> <p>07:00</p> <p>إلغاء جرعة الأنسولين</p> <p>إلغاء كل الجرعات</p> <p>جرعة الأنسولين م الموجات 1 س 10 د 3.50 و</p> <p>جرعة الأنسولين الممتدة 30 د 2.00 و</p>	<p>03</p> <p>07:00</p> <p>معلومة</p> <p>إلغاء كل الجرعات</p> <p>الكمية الإجمالية تم الإعطاء متبق</p> <p>9.00 و 5.50 و</p> <p>نعم لا</p>
<p>في بيان الحالة أو القائمة الرئيسية، انقر على </p>	<p>إذا كنت تريد إلغاء كل جرعات الإنسولين الجارية في نفس الوقت، انقر على إلغاء كل الجرعات.</p>	<p>انقر على نعم إذا كنت تريد إلغاء كل الجرعات.</p>

<p>04</p> <p>07:00</p> <p>W-38 تحذير</p> <p>تم إلغاء جرعة الأنسولين </p> <p>تم إلغاء جرعة الأنسولين</p> <p>تم الإعطاء مبرمج 9.00 و 14.5 و</p> <p>موافق</p>	<p>05</p> <p>07:00</p> <p>162 مج/دل 2018/03/29 ,06:55</p> <p>192 و</p> <p>إطار 1 0.70 و/مس جرعة جديدة</p> <p>+</p> <p>إضافة البيانات القائمة الرئيسية</p>
<p>للتأكيد انقر على موافق.</p>	<p>تم إلغاء كل جرعات الإنسولين وتم حذفها من بيان الحالة.</p>

إلغاء الجرعات المفردة

01	02	03
<p>07:00 </p> <p>162 مج/دل 2018/03/29 ,06:55</p> <p>192 و </p> <p>إطار 1 0.70 و/س جرعة الأنسولين م الموجات 1 س 10 د 3.50</p> <p>جرعة الأنسولين الممتدة 30 د 2.00</p> <p>إضافة البيانات </p> <p>القائمة الرئيسية </p>	<p>07:00 </p> <p>إلغاء جرعة الأنسولين </p> <p>إلغاء كل الجرعات </p> <p>جرعة الأنسولين م الموجات 1 س 10 د 3.50 </p> <p>جرعة الأنسولين الممتدة 30 د 2.00 </p>	<p>07:00 </p> <p>معلومة </p> <p>إلغاء جرعة الأنسولين متعددة </p> <p>الاسم تم الإعطاء متبق الوقت المتبقي</p> <p>1.50 و 3.50 و 1 س 10 د</p> <p>نعم لا</p>
<p>في بيان الحالة أو القائمة الرئيسية، انقر على </p>	<p>انقر على جرعة الإنسولين التي ترغب في إلغاؤها.</p>	<p>انقر على نعم إذا كنت تريد إلغاء جرعة الإنسولين.</p>

ملاحظة

الجرعة مستمرة حتى تقوم بالنقر على نعم.

04	05
<p>07:00  W-38 تحذير </p> <p>تم إلغاء جرعة الأنسولين </p> <p>تم إلغاء جرعة الأنسولين</p> <p>تم الإيعاء مبرمج 1.50 و 5.00</p> <p>موافق</p>	<p>07:00 </p> <p>162 مج/دل 2018/03/29, 06:55</p> <p>192 و </p> <p>إطار 1 0.70 و/مس جرعة الأنسولين الممتدة 30 د 2.00 و</p> <p>جرعة جديدة +</p> <p>القائمة الرئيسية إضافة البيانات </p>
<p>انقر على موافق لتأكيد التحذير.</p>	<p>تم إلغاء جرعة الإنسولين وتم حذفها من بيان الحالة.</p>

استخدام مدة تأخير

ما هي مدة تأخير بدء الإعطاء؟

في حالات معينة (حَزَلُ المعدة على سبيل المثال) قد يكون مفيدًا بدء جرعة الإنسولين خاصة بالوجبة بعد البدء في تناول الطعام. من خلال إعداد مدة تأخير بدء الإعطاء، يمكنك تحديد فترة تأخير ما بين برمجة جرعة الإنسولين والبدء الفعلي في إعطاء جرعة الإنسولين. عند تشغيل إعداد مدة التأخير، ستظهر خانة مدة تأخير بدء الإعطاء في كل مرة تقوم فيها ببرمجة جرعة الإنسولين بالإضافة إلى كمية جرعة الإنسولين والمدة. يمكنك ضبط مدة التأخير على 0 أو 15 أو 30 أو 45 أو 60 دقيقة. ناقش أخصائي الرعاية الصحية باستخدام إعداد مدة تأخير بدء الإعطاء. يجب عليك تنشيط هذه الوظيفة قبل أن تتمكن من استخدامها: انظر ، إعدادات جرعة الإنسولين.

ملاحظة

لا يمكن تأخير الجرعات التي تحتوي على إنسولين تصحيحي باستخدام مدة التأخير.

تأجيل إعطاء جرعة الإنسولين

01	02	03
07:00	07:00	07:00
إدخال جرعة الأنسولين	إدخال جرعة الأنسولين	جرعة الأنسولين القياسية
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>0.00 و</div> <div>--- مج/دل و --- </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6.00 و</div> <div>الكربوهيدرات جم --- </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6.00 و</div> <div>الكمية الإجمالية</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>النوع </div> <div>قياسي</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>0.00 و</div> <div>--- مج/دل و --- </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6.00 و</div> <div>الكربوهيدرات جم --- </div> </div> <hr/> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6.00 و</div> <div>الكمية الإجمالية</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>النوع </div> <div>قياسي</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>6.00 و</div> <div>الكمية الإجمالية</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>00 د</div> <div>مدة تأخير بدء الإعطاء</div> </div>
جرعة الأنسولين	جرعة الأنسولين	جرعة الأنسولين
<p>اختر خيارًا واحدًا من الخيارات الثلاثة لإعطاء جرعة الأنسولين المذكورة في القسم "جرعة الأنسولين القياسية". قم بتنفيذ الخطوات المناسبة إلى أن تظهر شاشة إدخال جرعة الأنسولين.</p>	<p>انقر على جرعة الأنسولين.</p>	<p>انقر على مدة تأخير بدء الإعطاء.</p>

04	05	06
<p>07:00 </p> <p>مدة تأخير بدء الإعطاء </p> <p>00</p> <p>ساعات</p> <p>+</p> <p>45</p> <p>دقائق</p> <p>موافق</p>	<p>07:00 </p> <p>جرعة الأنسولين القياسية </p> <p>الكمية الإجمالية 6.00 و</p> <p>مدة تأخير بدء الإعطاء 45 د</p> <p>جرعة الأنسولين</p>	<p>07:00 </p> <p>إعطاء الأنسولين </p> <p>إعطاء الجرعة القياسية </p> <p>الكمية الإجمالية 6.00 و</p> <p>مدة التأخير 45 د</p> <p>للتأكيد اضغط على </p>
<p>استخدم و لضبط مدة تأخير بدء الإعطاء.</p> <p>انقر على موافق.</p>	<p>انقر على جرعة الإنسولين.</p>	<p>للتأكيد هذه الخطوة وإعطاء جرعة الإنسولين القياسية، اضغط على زر الإنسولين.</p>

07

07:00

106 مج/دل

2018/03/29 ,06:55

195 و

إطار 1

1.20 و/س

جرعة الأنسولين القياسية

مدة التأخير 45 د

جرعة جديدة +

إضافة البيانات

القائمة الرئيسية

تعرض الشاشة بيان الحالة مع تفاصيل جرعة الإنسولين الحالية.

معتد/مسجل/مدوّن تحت اسم المنتج: نظام المضخة الصغيرة Accu-Chek Solo

ACCU-CHEK و ACCU-CHEK AVIVA SOLO و ACCU-CHEK AVIVA و ACCU-CHEK SMART PIX و ACCU-CHEK SOLO و ACCU-CHEK SOLO PERFORMA و FASTCLIX هي علامات تجارية تملكها شركة Roche.

علامة كلمة Bluetooth ® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لتلك العلامات من جانب شركة Roche يتم بمقتضى ترخيص.

جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية الأخرى تخص مالكيها المعنيين.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

