

كتيب^٩ التدريب

أكيو-تشيك® سولو نظام المضخة الصغيرة





تعديل وإضافة إطارات المعدل الأساسي

السبب وراء إطارات المعدل الأساسي المختلفة

بالإضافة إلى الإطار الأساسي الأولي الخاص بك، قد ترغب في استخدام إطارات معدل أساسي أخرى لمختلف المواقف اليومية الروتينية. يمكنك برمجة ما يصل إلى 5 إطارات أساسية مختلفة. ناقش طبيبك أو فريق الرعاية الصحية باستخدام إطارات أساسية مختلفة.

مثال

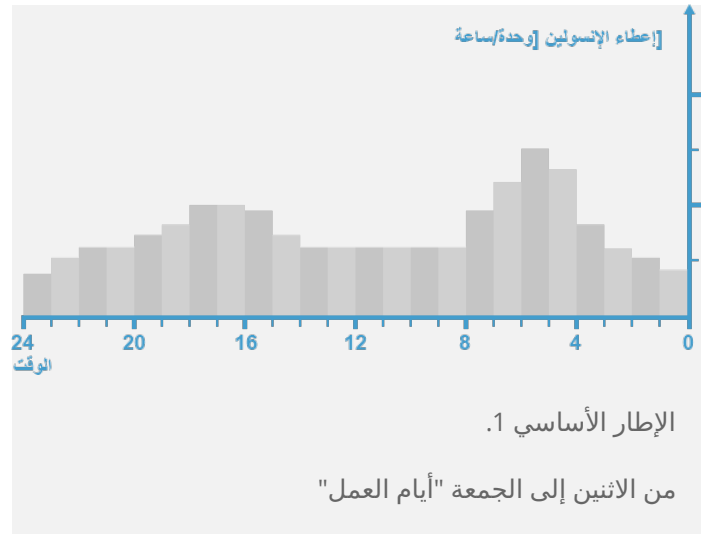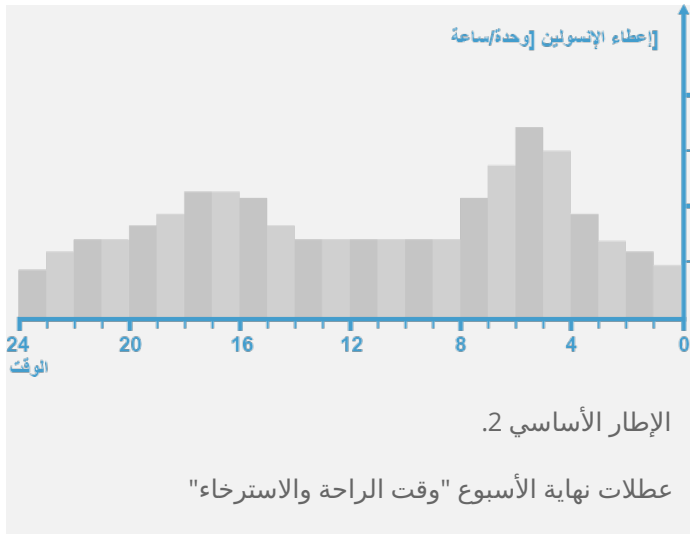

في هذا المثال، المستخدم هو عامل بناء، ومن الاثنين إلى الجمعة يعمل على قدميه من الصباح الباكر حتى نهاية اليوم. وفي عطلة نهاية الأسبوع يفضل النوم في وقت متأخر والاسترخاء والقراءة لساعات. بعد مناقشة مواقفه اليومية الروتينية المتنوعة مع الطبيب، قام المستخدم ببرمجة الإطار الأساسي 1 لأيام العمل. كما قام ببرمجة الإطار الأساسي 2 الذي يوفر المزيد من الإنسولين الأساسي لأيام السبت والأحد.

01

07:00

توقف

المعدل

جرعة

إعدادات

استبدال

القياس

و الطيران

USB

بياناتي

المساعدة

الإشارات

إضافة البيانات

بيان الحالة

انقر في القائمة الرئيسية على المعدل الأساسي.

07:00

106

مج/دل
2018/03/29, 06:55

و 150

إطار 1

1.20 و/س



جرعة جديدة

+

إضافة البيانات

القائمة الرئيسية

انقر في بيان الحالة على إطار المعدل الأساسي.

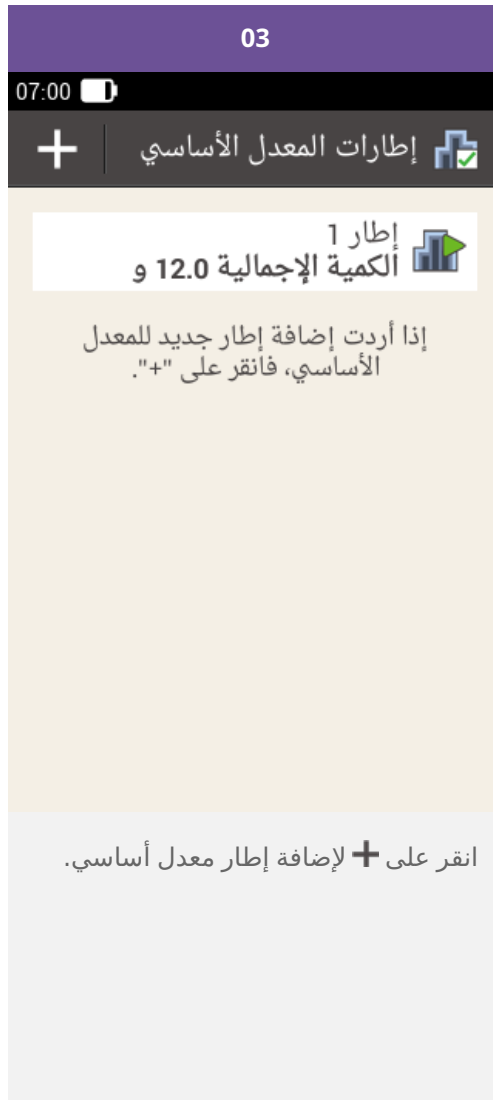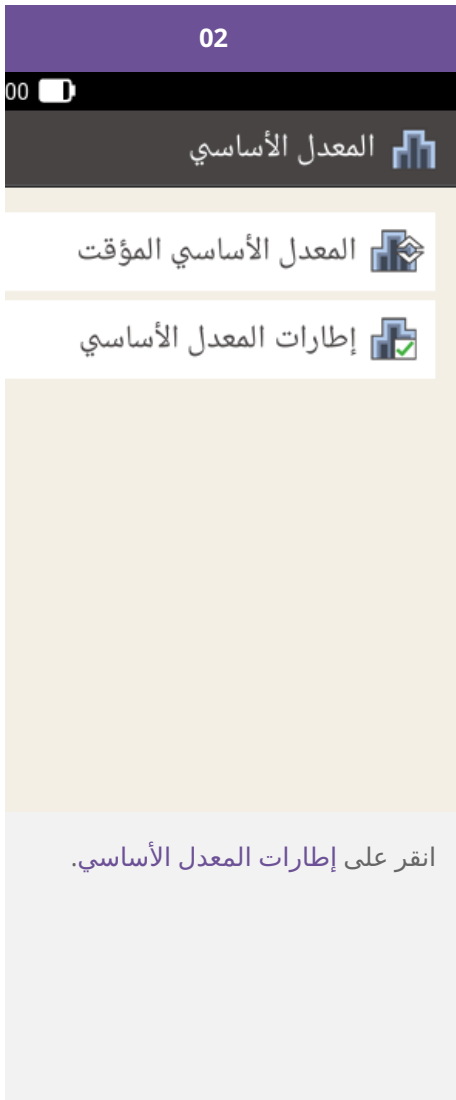

04

إطار المعدل الأساسي

إطار 1

البدء	وقت	و/س
07:00	08:00	0.00
08:00	09:00	0.00
09:00	10:00	0.00

تنشيط حفظ

انقر على لتسمية الإطار.

05

إطار المعدل الأساسي

إطار 1

البدء	وقت	و/س
07:00	08:00	0.00

أدخل الاسم المرغوب لإطار المعدل الأساسي (12 حرف بحد أقصى).
قم بعد ذلك بالنقر على تم.



ملاحظة

يمكنك فقط معالجة وقت انتهاء فترات الحيز الزمني للمعدل الأساسي. يتطابق وقت البدء لكل فترة حيز زمني مع وقت انتهاء فترة الحيز الزمني السابقة.

قم لحذف فترة حيز زمني بضبط وقت انتهاء فترة الحيز الزمني إلى وقت بدء فترة الحيز الزمني نفسها.

لإضافة فترة حيز زمني جديدة، قم بتعيين وقت الانتهاء لفترة الحيز الزمني الأخيرة على وقت البدء المرغوب فيه لفترة الحيز الزمني الجديدة.

لا تتطابق فترات الحيز الزمني للمعدل الأساسي مع فترات الحيز الزمني لاستشارات جرعة الإنسولين ولا يتم أيضًا استخدامها لها.




أدخل كمية الإنسولين في الساعة لفترة الحيز الزمني.
انقر على موافق.

تابع إدخال أوقات الانتهاء والمعدلات الأساسية لكل ساعة إلى أن تنتهي من برمجة المعدلات الأساسية الملائمة لكل ساعة من اليوم.

إذا كنت ترغب في حفظ إطار المعدل الأساسي هذا ولكن عدم تنشيطه حالياً، فواصل بالانتقال إلى الخطوة 09.


إذا كنت ترغب في حفظ الإطار الأساسي الجديد وتنشيطه على الفور، انقر فوق "تنشيط". واصل بالانتقال إلى الخطوة 11.

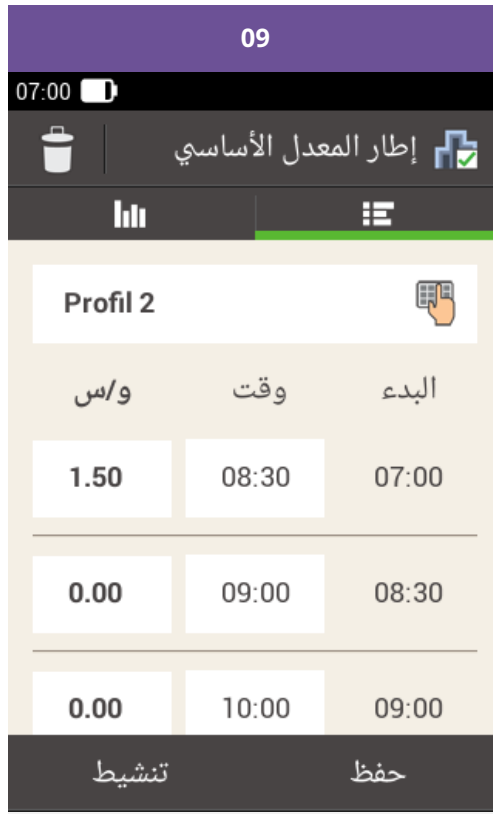

انقر على **حفظ** لحفظ إطار المعدل الأساسي المبرمج.

إطارات المعدل الأساسي

إطار 1 
الكمية الإجمالية 12.0 و

إطار 2 
الكمية الإجمالية 16.0 و

إذا أردت إضافة إطار جديد للمعدل الأساسي، فانقر على "+".

يتم عرض إطار المعدل الأساسي المبرمج حديثاً في النظرة العامة لإطارات المعدل الأساسي الموجودة. تأكد من أن الكمية الإجمالية المعروضة تتوافق مع الكمية الإجمالية للإنسولين الأساسي المحددة من قبل أخصائي الرعاية الصحية. مع ذلك، لن يتم تنشيطها تلقائياً.

انظر القسم التالي حول كيفية تنشيط إطار معدل أساسي.

تنشيط إطار معدل أساسي

قم بتنشيط الإطار الملائم عندما يحين وقت ذلك. على سبيل المثال، عندما تقوم بالتغيير إلى موافك الروتينية لعطلة نهاية الأسبوع في ليلة الجمعة، قم بتنشيط الإطار الذي قمت ببرمجته لعطلات نهاية الأسبوع.

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The top status bar shows the time as 07:00 and a battery icon. The left screenshot shows a grid of icons for various settings: 'توقف' (Stop), 'المعدل' (Rate), 'جرعة' (Dose), 'إعدادات' (Settings), 'استبدال' (Replace), 'القياس' (Measurement), 'و الطيران' (and flight), 'USB', 'بياناتي' (My data), 'المساعدة' (Help), and 'الإشارات' (Signals). At the bottom, there are buttons for 'إضافة البيانات' (Add data) and 'بيان الحالة' (Status report). The right screenshot shows a green banner with the number '106' and 'مج/دل' (Mg/dl) next to it, with the date and time '2018/03/29, 06:55' below. Below the banner, there is a purple box with '150 و' (and 150) and a purple box with a white plus sign. Below that, there is a white box with 'إطار 1' (Plan 1), '1.20 و/س' (1.20 W/S), and 'جرعة جديدة' (New dose). At the bottom, there are buttons for 'إضافة البيانات' (Add data) and 'القائمة الرئيسية' (Home screen). Below the screenshots, there are two lines of text: 'انقر في القائمة الرئيسية على المعدل الأساسي.' (Click in the home screen on the basic rate.) and 'انقر في بيان الحالة على إطار المعدل الأساسي.' (Click in the status report on the basic rate plan.)

01

07:00 07:00

توقف المعدل جرعة

إعدادات استبدال القياس

و الطيران USB بياناتي

المساعدة الإشارات


إطار 1
1.20 و/س
جرعة جديدة

إضافة البيانات بيان الحالة

إضافة البيانات القائمة الرئيسية

انقر في القائمة الرئيسية على المعدل الأساسي.

انقر في بيان الحالة على إطار المعدل الأساسي.

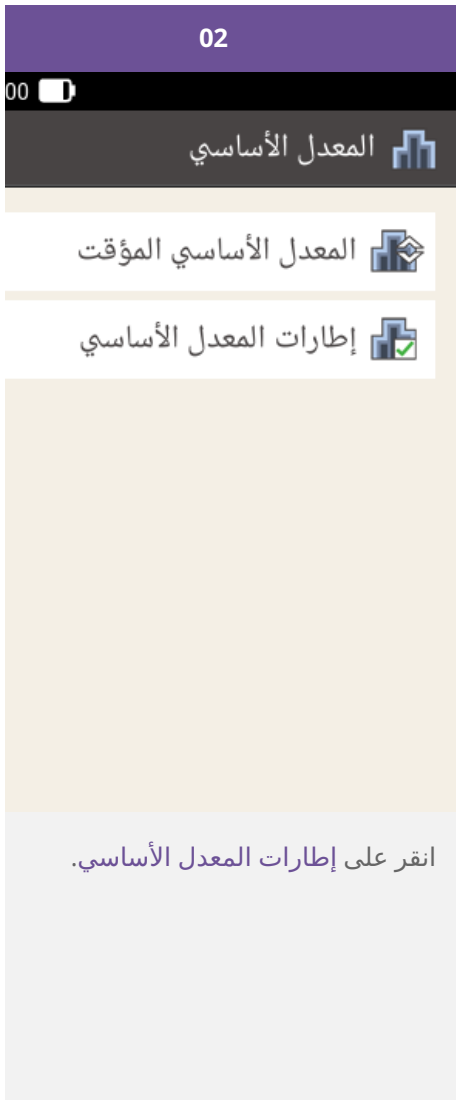

04

إطار المعدل الأساسي

Profil 2

و/س	وقت	البدء
1.50	08:30	07:00
1.30	09:00	08:30
0.90	10:00	09:00

تنشيط حفظ

حرّك الشاشة إذا لزم الأمر نحو الأعلى
لتممكن من رؤية كل فترات الحيز الزمني
لإطار المعدل الأساسي.

انقر على  لرؤية العرض الرسومي
للإطار.

انقر على تنشيط.

05

إعطاء الأنسولين

تنشيط إطار
المعدل الأساسي

Profil 2

الكمية الإجمالية 16.0 و

للتأكيد اضغط على 

للتأكيد، اضغط على زر الإنسولين .

06

00 

مج/دل 106
2017/03/08 ,06:55

و 150 

إطار 1
1.50 و/س
جرعة جديدة

إضافة
البيانات



القائمة
الرئيسية

يتم عرض إطار المعدل الأساسي النشط
في بيان الحالة.

01

00

+ إطارات المعدل الأساسي

إطار 1
الكمية الإجمالية 12.0 و

إطار 2
الكمية الإجمالية 16.0 و

إذا أردت إضافة إطار جديد للمعدل الأساسي، فانقر على "+".

انقر على إطار المعدل الأساسي الذي ترغب في تغييره (على إطار 2 على سبيل المثال).

يمكنك التعرف على إطار المعدل الأساسي النشط حاليًا من خلال .

02

07:00

إطار المعدل الأساسي

Profil 2

البدء	وقت	و/س
07:00	08:30	1.50
08:30	09:00	1.30
09:00	10:00	0.90

تنشيط حفظ

انقر على وقت الانتهاء لتغيير وقت الانتهاء لفترة الحيز الزمني.

انقر على معدل أساسي لتغيير المعدل الأساسي لفترة الحيز الزمني.

قم بتكرار هذه الطريقة حتى تتم برمجة المعدل الأساسي الصحيح لكل ساعة من اليوم.


انقر على حفظ.

ملاحظة

حرّك الشاشة إذا لزم الأمر نحو الأعلى لتتمكن من فحص كل فترات الحيز الزمني لإطار المعدل الأساسي.

إطارات المعدل الأساسي

إطار 1 
الكمية الإجمالية 12.0 و

إطار 2 
الكمية الإجمالية 16.0 و

إذا أردت إضافة إطار جديد للمعدل الأساسي، فانقر على "+".

يتم عرض إطار المعدل الأساسي المعدّل في النظرة العامة لإطارات المعدل الأساسي الموجودة.

تأكد من أن الكمية الإجمالية المعروضة تتوافق مع الكمية الإجمالية المحددة من قبل فريق الرعاية الصحية.

01

07:00

توقف

المعدل

جرعة

إعدادات

استبدال

القياس

و الطيران

USB

بياناتي

المساعدة

الإشارات

إضافة البيانات

بيان الحالة

انقر في القائمة الرئيسية على المعدل الأساسي.

07:00

106

مج/دل
2018/03/29, 06:55

و 150

إطار 1

1.20 و/س

جرعة جديدة


+


إضافة البيانات


القائمة الرئيسية


انقر في بيان الحالة على إطار المعدل الأساسي.

02

00 

المعدل الأساسي 

المعدل الأساسي المؤقت 

إطارات المعدل الأساسي 

انقر على إطارات المعدل الأساسي.

03

07:00 

+ إطارات المعدل الأساسي 

إطار 1 
الكمية الإجمالية 10.0 و

إطار 2 
الكمية الإجمالية 14.0 و

إطار 3 
الكمية الإجمالية 18.0 و

إذا أردت إضافة إطار جديد للمعدل الأساسي، فانقر على "+".

انقر على إطار المعدل الأساسي الذي ترغب في حذفه (إطار المعدل الأساسي 3 مثلاً).


04

إطار المعدل الأساسي

Profil 3

و/س	وقت	البدء
1.10	08:30	07:00
0.80	09:30	08:30
0.70	10:30	09:30

تم

انقر على  في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

05

معلومة

حذف المدخل؟ 


هذه العملية لا يمكن الرجوع عنها.

نعم لا

إذا كان من المراد حذف إطار المعدل الأساسي النشط، سيظهر العرض التالي. انقر على نعم.

إطارات المعدل الأساسي

إطار 1 
الكمية الإجمالية 10.0 و

إطار 2 
الكمية الإجمالية 14.0 و

إذا أردت إضافة إطار جديد للمعدل الأساسي، فانقر على "+".

تم حذف إطار المعدل الأساسي المختار من اللائحة.

معتد/مسجل/مدوّن تحت اسم المنتج: نظام المضخة الصغيرة Accu-Chek Solo

ACCU-CHEK و ACCU-CHEK AVIVA و ACCU-CHEK AVIVA SOLO و ACCU-CHEK SMART PIX و ACCU-CHEK SOLO و ACCU-CHEK SOLO PERFORMA هي علامات تجارية تملكها شركة Roche و FASTCLIX.

علامة كلمة Bluetooth ® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لتلك العلامات من جانب شركة Roche يتم بمقتضى ترخيص.

جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية الأخرى تخص مالكيها المعنيين.

© 2021 Roche Diabetes Care

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com

